

**JOBST**®



**Comfortabele  
compressie  
gedurende  
de nacht**

**JOBST® Relax**

Helpt om lymfoedeem te stabiliseren

# Nachtcompressie

Patiënten met lymfoedeem kunnen last krijgen van fluctuerend oedeem wat niet meer verdwijnt tijdens de nachtrust (ISL 2a\*). **Nachtcompressie** helpt, in combinatie met dagcompressie, om oedeemfluctuatie tegen te gaan en kan een effectieve aanvulling zijn op de behandeling in de onderhoudsfase.


**JOBST Relax** is een innovatief compressieproduct dat speciaal is ontwikkeld voor gebruik gedurende de nacht en biedt patiënten:

- ✓ de mogelijkheid tot zelfmanagement
- ✓ een hoog draagcomfort voor een betere therapietrouw
- ✓ meer stabiliteit en controle over hun oedeem in combinatie met dagcompressie



# JOBST® Relax voor bewezen comfort gedurende de nacht<sup>1</sup>

In een recent onderzoek zijn de ervaringen van patiënten met lymfoedeem met **JOBST Relax** tijdens rust en de nacht in kaart gebracht.

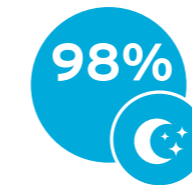


## Betere nachtrust

98% van de patiënten beoordeelden hun nachtrust met goed tot zeer goed in vergelijking met andere compressieproducten voor de nacht.



## Oedeemreductie

Veel patiënten constateerden een afname van oedeem de volgende ochtend, waarbij 90% aangaf dat na het dragen van JOBST Relax het aantrekken van de dagcompressie veel beter ging.

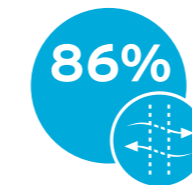

## Ademend vermogen

86,8% vond JOBST Relax goed tot zeer goed in het voorkomen van warmtestuwing gedurende de nacht.

1. Bertsch, T. 2018, British Journal of Community Nursing, Vol. 23, No 11, P. 535 - 541

# JOBST® Relax

## Innovatief ontwerp voor een **betere nachtrust** dankzij ademend vermogen

JOBST Relax is een uniek product, waarvoor een **geheel nieuwe breitechniek** ontwikkeld is. Het product bestaat uit twee lagen vlakbreimateriaal met daartussen een "comfortruimte" met verbindende vezels. Deze innovatieve "comfortruimte" zorgt ervoor dat JOBST Relax een **hoog ademend vermogen** heeft, soepel aanvoelt en **niet insnoert**. De verbindende vezels zijn licht en soepel waardoor het product makkelijk meebeweegt met de patiënt. Dit draagt bij aan een **goede nachtrust**. Ondanks het soepele karakter geeft JOBST Relax effectieve compressie in combinatie met een **hoge stiffness**.

**Micromassage** door de speciaal ontworpen oppervlaktestructuur



Micro-Massage

Extra zacht door unieke vlakbrei-techniek voor **meer comfort**




Cushioning

**Ademend vermogen** door speciale garens en flexibele tussenlaag met verbindende vezels



Breathable

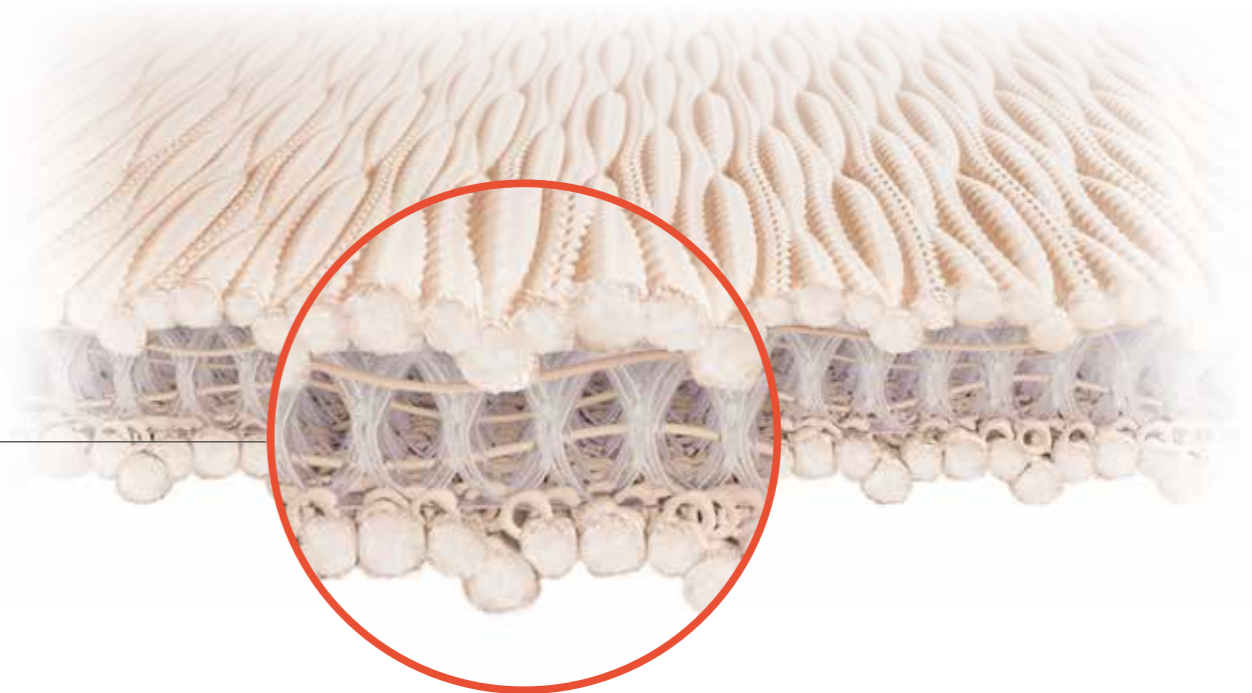

# Meettips

## Algemeen

- ✓ JOBST Relax heeft een gradueel aflopend drukpatroon. De druk ter hoogte van meetpunt B of C is dus hoger dan ter hoogte van meetpunt G. De massagewerking van het materiaal is daarom minder prominent op het bovenbeen of de bovenarm.
- ✓ Meet met behulp van een maatplank om zeker te zijn van accurate lengtematen. Ook bij herhalingsmetingen komt de maatplank van pas; u weet zeker dat u op dezelfde punten de omvang meet. Hierdoor zijn eventuele maatverschillen ook beter te controleren.
- ✓ Over het algemeen wordt JOBST Relax met aangetrokken meetlint gemeten. Hierdoor blijft de pasvorm ook na een aantal weken dragen behouden.
- ✓ Het is gebruikelijk dat JOBST Relax iets afzakt tijdens de nacht als de patiënt met gebogen benen slaapt.

## Maatname

- ✓ Meet **IA-B (AG1)** 1 cm langer dan bij een vlakbrei handschoen. Het handgedeelte valt dan net over de knokkels.
- ✓ Meet de **cX duim (AG1)** met een ruime lus. De duim fixeert JOBST Relax op de hand maar geeft geen druk.
- ✓ Meet **cG (arm én been)** strakker dan een vlakbreikous met siliconenboord. JOBST Relax sluit dan goed aan.
- ✓ Meet **cB (been)** lossier bij een omvang kleiner dan 21 cm. Dit vergemakkelijkt het aantrekken.
- ✓ Meet **IA (been)** aan de mediale zijde om te voorkomen dat de voetlengte te kort wordt.
- ✓ Overweeg bij een **cF (been)** groter dan 72 cm de inzet van JoViPak.

# JOBST® Relax en JOBST® JoViPak

## Innovatief compressieverband voor de nacht JOBST Relax

- Comfortabel dubbellaags vlakbreimateriaal wat niet insnoert
- Zeer goed ademend vermogen
- Aanvulling op dagcompressie
- Inzetbaar vanaf ISL 2a\*



## Compressie voor complexe casuïstiek JOBST JoViPak

- Foamdeeltjes van wisselende grootte zorgen voor puntsgewijze druk
- Ontworpen voor inzet bij harde fibrose
- In uiteenlopende uitvoeringen verkrijgbaar, voor alle lichaamsdelen
- Inzetbaar vanaf ISL 2b\*



## Lite en Strong variant

JOBST Relax is voor de onderste extremiteiten beschikbaar in twee varianten, Lite en Strong. De Lite variant wordt ingezet bij lichtere fibrosevorming en/of compressiebehoefte (ISL 2a). De Strong variant wordt ingezet bij zwaardere fibrosevorming en/of compressiebehoefte (ISL 2b).

\*The diagnosis and treatment of peripheral lymphedema: 2016 consensus document of the International Society of Lymphology

# Productassortiment JOBST® Relax

Omschrijving			Artikelnummer	Z-indexnummer
<b>AG1</b> 	LITE (15-20 mmHg)	Armverband AG1 Beige	76087-00000-00	16346440
<b>CG1</b> 	LITE (15-20 mmHg)	Armverband CG1 Beige	76088-00000-00	16346467
<b>AD</b> 	LITE (15-20 mmHg)	Beenverband AD Beige	76095-00000-00	16346300
	STRONG (20-30 mmHg)	Beenverband AD Beige	76097-00000-00	16346378
<b>AG</b> 	LITE (15-20 mmHg)	Beenverband AG Beige	76096-00000-00	16346408
	STRONG (20-30 mmHg)	Beenverband AG Beige	76098-00000-00	16346416

Let op; iedere zorgverzekeraar hanteert een wisselend beleid ten opzichte van de vergoeding van nachtcompressieproducten. Check vooraf het beleid van de zorgverzekeraar.

Een rits verruimt de omvang met 2 cm en kan daardoor het aantrekken vergemakkelijken. Pas echter op bij patiënten met een kwetsbare huid, neuropathie of wonden. De rits kan achteraf niet verwijderd worden.

**Kijk voor overige informatie ook op [www.jobst.nl](http://www.jobst.nl)**

**JOBST® Relax** wordt geleverd in een satijnen tas met trekkoord om het product beschermd in te bewaren. Tijdens het wassen kan gebruik worden gemaakt van een reguliere waszak.

