

JOBST®




JOBST® UlcerCARE

Compressiesysteem voor de behandeling van een veneuze ulcus cruris

De meest voorkomende onderliggende oorzaak van een ulcus cruris venosum is veneuze insufficiëntie. De verstoorde bloedtoevoer naar het hart is voornamelijk het gevolg van slecht functionerende kleppen in het veneuze systeem. Wanneer de veneuze kleppen niet goed functioneren, wordt een constante druk van 40 mmHg* of meer op de enkel aanbevolen om de terugstroom van het bloed naar het hart te ondersteunen.

Behandelstappen:

De **JOBST UlcerCARE** is een 2-delig compressiesysteem bestaande uit een onderkous en een bovenkous.

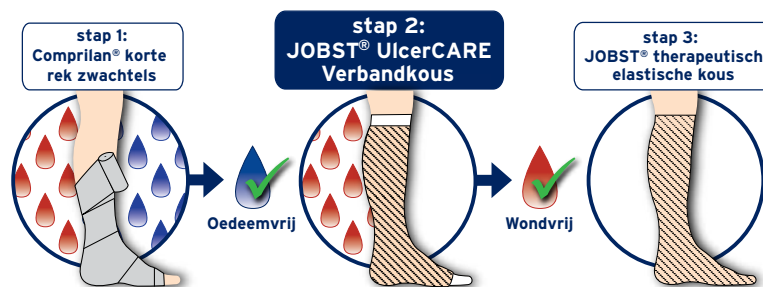

De patiënt

✓ Heeft een open wond, een ulcus cruris venosum, en geen oedeemvorming of stabiel oedeem.



JOBST® UlcerCARE

- Geeft de aanbevolen graduele compressie van 40 mmHG op de enkel uitgaande van een gemiddelde omvang.
- Biedt een hoge weerstand (stiffness) die bijdraagt aan het genezingsproces van de ulcus cruris.*
- Ontworpen om gemakkelijk aan te trekken dankzij de zachte onderkous.
- Kan in combinatie met gewone schoenen en kleding worden gebruikt om een normaal leven mogelijk te maken.

JOBST® UlcerCARE onderkous:

- ✓ Gemaakt van 79% nylon/polyamide, 16% spandex/elasthaan en 5% zijde. Bevat geen natuurrubber latex.
- ✓ Kan 24 uur per dag worden gedragen
- ✓ Heeft een **verstevigd hiel- en teenstuk**
- ✓ **Bevat zijde** om de huid gezond te houden
- ✓ Kan op 60 °C worden gewassen

JOBST® UlcerCARE bovenkous:



- ✓ Gemaakt van 76% nylon/polyamide en 24% spandex/elasthaan. Bevat geen natuurrubber latex.
- ✓ Ontworpen om gemakkelijk over de onderkous aan te trekken en kan 16 uur per dag worden gedragen
- ✓ Heeft een **verstevigd hielstuk en een open teen**
- ✓ Kan op 40 °C worden gewassen

* Beoogde nominale compressie voor een gemiddelde enkelomvang.

** Rapport van de European Wound Management Association (EWMA), Understanding compression therapy, 2003.

Maatoverzicht

Als u een **JOBST UlcerCARE** compressiesysteem bestelt voor een specifieke patiënt, vergeet dan niet te controleren of uw metingen overeenkomen met de maten in het overzicht.

Maat	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
2 	18 - 21	21 - 24	24 - 27	27 - 30	30 - 33	33 - 36	36 - 39
3 	29 - 35	34 - 41	40 - 47	46 - 54	48 - 56	50 - 58	52 - 60

De **JOBST UlcerCARE** is verkrijgbaar in 7 maten en 2 kleuren (beige en zwart).
Een **JOBST UlcerCARE** systeem bevat één bovenkous en twee onderkousen.

Assortiment

Omschrijving	Maat	Kleur	Artikelnummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-index nummer	Memo-code
UlcerCARE systeem zonder rits	S	beige	73630-21	1	10 x 1 (10)	15630870	ULCEKS
UlcerCARE systeem zonder rits	M	beige	73630-22	1	10 x 1 (10)	15630862	ULCEKM
UlcerCARE systeem zonder rits	L	beige	73630-23	1	10 x 1 (10)	15630854	ULCEKL
UlcerCARE systeem zonder rits	XL	beige	73630-24	1	10 x 1 (10)	15630889	ULCEKX
UlcerCARE systeem zonder rits	XXL	beige	73630-25	1	10 x 1 (10)	15630897	ULCEKX
UlcerCARE systeem zonder rits	XXXL	beige	73630-26	1	10 x 1 (10)	15630900	ULCEKX
UlcerCARE systeem zonder rits	XXXXL	beige	73630-27	1	10 x 1 (10)	15630919	ULCEKX
UlcerCARE systeem zonder rits	S	zwart	73630-41	1	10 x 1 (10)	15630943	ULCEKS
UlcerCARE systeem zonder rits	M	zwart	73630-42	1	10 x 1 (10)	15630935	ULCEKM
UlcerCARE systeem zonder rits	L	zwart	73630-43	1	10 x 1 (10)	15630927	ULCEKL
UlcerCARE systeem zonder rits	XL	zwart	73630-44	1	10 x 1 (10)	15630951	ULCEKX
UlcerCARE systeem zonder rits	XXL	zwart	73630-45	1	10 x 1 (10)	15630978	ULCEKX
UlcerCARE systeem zonder rits	XXXL	zwart	73630-46	1	10 x 1 (10)	15630986	ULCEKX
UlcerCARE systeem zonder rits	XXXXL	zwart	73630-47	1	10 x 1 (10)	15630994	ULCEKX
UlcerCARE systeem met linkerrits	S	beige	73631-21	1	10 x 1 (10)	15630560	ULCEKS
UlcerCARE systeem met linkerrits	M	beige	73631-22	1	10 x 1 (10)	15630552	ULCEKM
UlcerCARE systeem met linkerrits	L	beige	73631-23	1	10 x 1 (10)	15630544	ULCEKL
UlcerCARE systeem met linkerrits	XL	beige	73631-24	1	10 x 1 (10)	15630579	ULCEKX
UlcerCARE systeem met linkerrits	XXL	beige	73631-25	1	10 x 1 (10)	15630587	ULCEKX
UlcerCARE systeem met linkerrits	XXXL	beige	73631-26	1	10 x 1 (10)	15630595	ULCEKX
UlcerCARE systeem met linkerrits	XXXXL	beige	73631-27	1	10 x 1 (10)	15630609	ULCEKX
UlcerCARE systeem met linkerrits	S	zwart	73631-41	1	10 x 1 (10)	15630633	ULCEKS
UlcerCARE systeem met linkerrits	M	zwart	73631-42	1	10 x 1 (10)	15630625	ULCEKM
UlcerCARE systeem met linkerrits	L	zwart	73631-43	1	10 x 1 (10)	15630617	ULCEKL
UlcerCARE systeem met linkerrits	XL	zwart	73631-44	1	10 x 1 (10)	15630641	ULCEKX
UlcerCARE systeem met linkerrits	XXL	zwart	73631-45	1	10 x 1 (10)	15630668	ULCEKX
UlcerCARE systeem met linkerrits	XXXL	zwart	73631-46	1	10 x 1 (10)	15630676	ULCEKX
UlcerCARE systeem met linkerrits	XXXXL	zwart	73631-47	1	10 x 1 (10)	15630684	ULCEKX

Assortiment

Omschrijving	Maat	Kleur	Artikelnummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-index nummer	Memo-code
UlcerCARE systeem met rechters	S	beige	73631-61	1	10 x 1 (10)	15630714	ULCEKS
UlcerCARE systeem met rechters	M	beige	73631-62	1	10 x 1 (10)	15630706	ULCEKM
UlcerCARE systeem met rechters	L	beige	73631-63	1	10 x 1 (10)	15630692	ULCEKL
UlcerCARE systeem met rechters	XL	beige	73631-64	1	10 x 1 (10)	15630722	ULCEKX
UlcerCARE systeem met rechters	XXL	beige	73631-65	1	10 x 1 (10)	15630730	ULCEKX
UlcerCARE systeem met rechters	XXXL	beige	73631-66	1	10 x 1 (10)	15630749	ULCEKX
UlcerCARE systeem met rechters	XXXXL	beige	73631-67	1	10 x 1 (10)	15630757	ULCEKX
UlcerCARE systeem met rechters	S	zwart	73631-71	1	10 x 1 (10)	15630781	ULCEKS
UlcerCARE systeem met rechters	M	zwart	73631-72	1	10 x 1 (10)	15630773	ULCEKM
UlcerCARE systeem met rechters	L	zwart	73631-73	1	10 x 1 (10)	15630765	ULCEKL
UlcerCARE systeem met rechters	XL	zwart	73631-74	1	10 x 1 (10)	15630803	ULCEKX
UlcerCARE systeem met rechters	XXL	zwart	73631-75	1	10 x 1 (10)	15630811	ULCEKX
UlcerCARE systeem met rechters	XXXL	zwart	73631-76	1	10 x 1 (10)	15630838	ULCEKX
UlcerCARE systeem met rechters	XXXXL	zwart	73631-77	1	10 x 1 (10)	15630846	ULCEKX
UlcerCARE onderkous	S	wit	73632-21	3	10 x 1 (10)	15632261	ULCEKS
UlcerCARE onderkous	M	wit	73632-22	3	10 x 1 (10)	15632288	ULCEKM
UlcerCARE onderkous	L	wit	73632-23	3	10 x 1 (10)	15632296	ULCEKL
UlcerCARE onderkous	XL	wit	73632-24	3	10 x 1 (10)	15632318	ULCEKX
UlcerCARE onderkous	XXL	wit	73632-25	3	10 x 1 (10)	15632326	ULCEKX
UlcerCARE onderkous	XXXL	wit	73632-26	3	10 x 1 (10)	15632334	ULCEKX
UlcerCARE onderkous	XXXXL	wit	73632-27	3	10 x 1 (10)	15632342	ULCEKX

Daarom **JOBST®**

Dankzij meer dan **65 jaar** ervaring weet JOBST als geen ander waar mensen met veneuze en lymfatische aandoeningen behoefte aan hebben. Daarom vinden professionals binnen het brede JOBST-assortiment voor iedere unieke cliënt een passende compressie-oplossing. Met úw expertise en de producten & services van JOBST maken we samen het leven van elke cliënt lichter: **een leven vol zelfvertrouwen en zonder compromissen als het gaat om comfort & kwaliteit.**