

A woman with blonde hair, wearing an orange sleeveless top and grey trousers, is sitting on a light-colored stone ledge. She is smiling and looking down at her right arm, which is wearing a blue compression sleeve with the 'JOBST' logo. The background is a solid blue wall.

NACHT- COMPRESSIE VOOR COMPLEXE CASUÏSTIEK

JOBST® JoViPak
Oplossingen voor het hele lichaam



N I E T S H O U D T J E T E G E N

OPLOSSINGEN VOOR HET HELE LICHAAM


In de onderhoudsfase kan het onder controle houden van lymfoedeem een uitdaging zijn voor de patiënt en behandelaar. Als er sprake is van pitting oedeem dat zelden verdwijnt door hoog leggen met eventueel beginnende fibrose, dan kan een compressiehulpmiddel gedurende de nacht uitkomst bieden.

JOBST JoViPak-producten bevatten foamdeeltjes van wisselende grootte die zorgen voor dynamische puntdrukken en zijn ontworpen om lymfevocht af te voeren en fibrotisch weefsel te verzachten. Het assortiment is zeer breed en bevat, naast maatwerkproducten voor het hele lichaam, ook pads die overdag gedragen kunnen worden. JOBST JoViPak is inzetbaar vanaf ISL 2a*.

Nachtcompressie geeft de beste resultaten wanneer het onderdeel is van het behandelplan en past bij de gezamenlijk vastgestelde therapiedoelen. Dit vergroot de kans op een betere therapietrouw.

We helpen u graag mocht u vragen hebben. Neem contact op met onze afdeling Customer Service (JOBST.cs.nl@essity.com) of uw Account Manager.

* The diagnosis and treatment of peripheral lymphedema: 2016 consensus document of the International Society of Lymphology

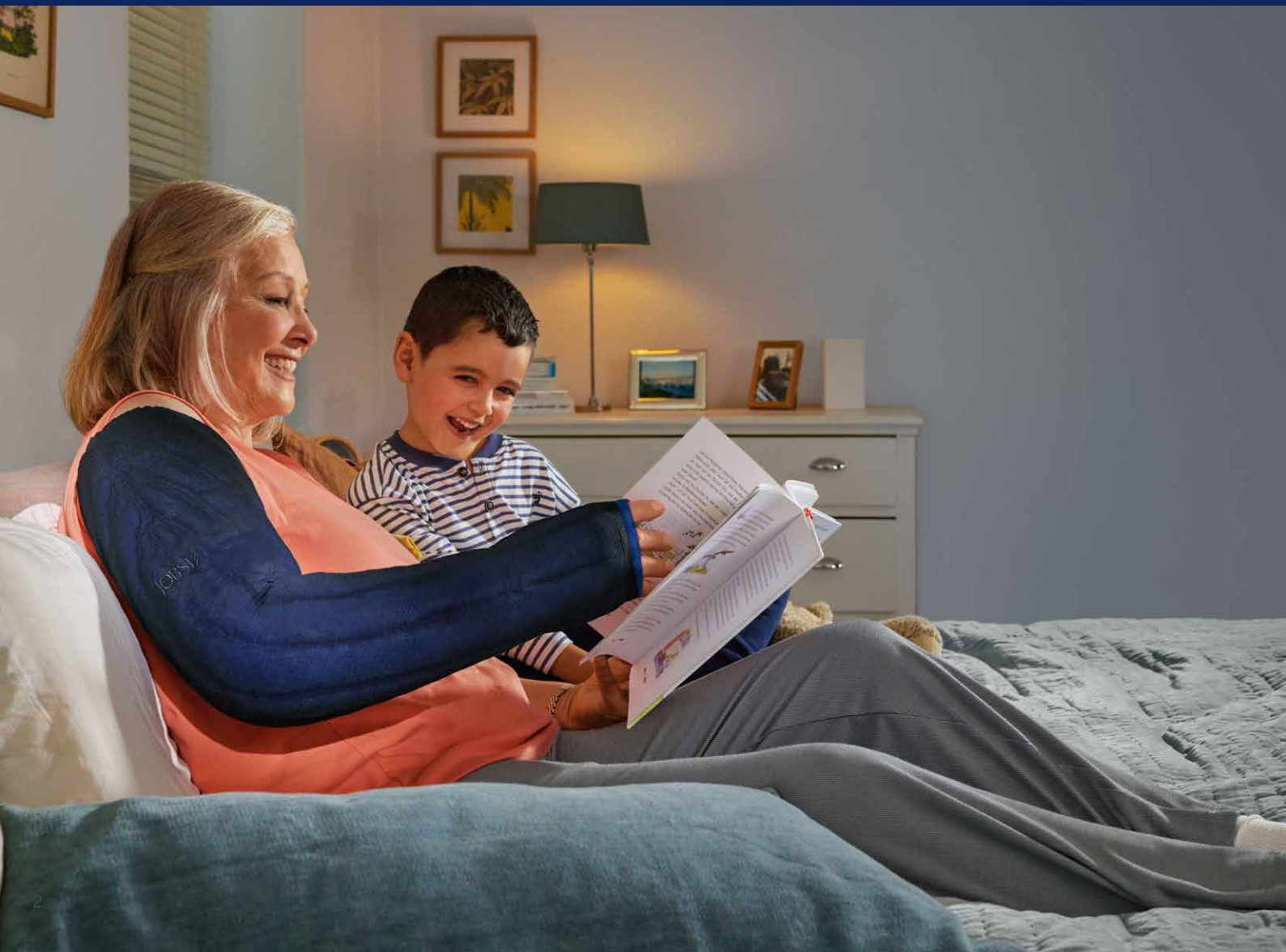

COMPRESSIE WAAR DAT NODIG IS

HOOFD, NEK EN KIN

Confectie:

- Kinband standaard en uitgebreid
- Half- en volledig gezichts- en nekmasker
- Nekpads

(geen maatwerk beschikbaar)

TORSO

Maatwerk:

- Schouder-Thorax bandage (met of zonder padding)
- Busti
- Vest
- JoViJacket voor extra compressie

Confectie:

Pads borst en borstwand

GENITAAL GEBIED

Confectie:

- Genitale pads (zowel voor mannen als voor vrouwen)

(geen maatwerk beschikbaar)

*JOBST JoViPads en
JOBST PitPaks kunnen
overal op het lichaam
worden gebruikt.*

BOVENSTE LEDEMATEN

Maatwerk:

- Armbandage - in één of twee delen
- JoViJacket voor extra compressie

(geen confectie beschikbaar)

ONDERSTE LEDEMATEN

Maatwerk:

- Beenbandage - hele been of onderbeen
- Hip Hugger
- Boxer Short
- JoViJacket voor extra compressie

(geen confectie beschikbaar)

We helpen u graag mocht u vragen hebben. Neem contact op met onze afdeling Customer Service (JOBST.cs.nl@essity.com) of uw Account Manager.

JOBST® JOVIPAK MATERIAALOPTIES

JOVIPAK® STOFFEN

- **JoViPak Arm- en Beenbandage, Schouder-Thorax, Busti:** Polartec® Power Dry®, gemaakt van 100% polyester microvezelgarens. Polartec® Power Dry® draagt comfortabel dankzij de dempende en vochtafvoerende materiaaleigenschappen.
- **JoViJacket:** Powernet, gemaakt van nylon met spandex®, een sterk materiaal met beperkte rek.
- **JoViPak Hip hugger, Vest, en de Hoofd, nek- en kinverbanden:** gemaakt van 90% katoen en 10% Lycra®.

JOVIPAK SCHUIM

- Bromidevrij
- Mengsel van twee tot vier soorten zeer veerkrachtig polyurethaan, onregelmatig van structuur en grootte
 - 2 blend foam: alleen in combinatie met Slimline kanalen
 - 4 blend foam: alleen in combinatie met Standaard kanalen

KANALEN

- Standaard - ruim 3 cm tussen kanalen (4 blend foam)
- Slimline - 2,5 cm tussen kanalen (2 blend foam)
(Meer kanalen met minder schuim, waardoor dunner)

We helpen u graag mocht u vragen hebben. Neem contact op met onze afdeling Customer Service (JOBST.cs.nl@essity.com) of uw Account Manager.

KINBAND STANDAARD



CONFECTIE:

Wanneer inzetbaar:

Voor oedeem in de nek, onderkaak en de voorste/laterale delen van het gezicht. De kinband standaard bedekt gedeeltelijk de oren. Een open naad in de nek maakt het mogelijk een pad te plaatsen voor maximale therapeutische effectiviteit. Hoewel het precieze type pad afhankelijk is van de toestand van de patiënt, wordt aanbevolen voor deze kinband de JoViPak Nekpad Universeel te gebruiken.

Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L en XL

Noot:

U kunt de bijpassende JoViPak Nekpad Universeel eenvoudig via hetzelfde bestelformulier bestellen.

Materiaal	Katoen/Lycra®	
Kleur	Ivory	

NEKPAD UNIVERSEEL



CONFECTIE:

De universele JoViPak Nekpad is ontwikkeld om te worden gebruikt met de standaard kinband en helpt bij het aanpakken van (bilateraal) nekoedeem en bij zwelling van de nek voor de oren.

Noot:

Dit product kan niet los gebruikt worden.

Materiaal	Katoen/Lycra®	
Kleur	Ivory	

KINBAND UITGEBREID



CONFECTIE:

Wanneer inzetbaar:

Voor oedeem in de nek, onderkaak en de voorste/laterale delen van het gezicht. De kinband uitgebreid bedekt de oren, de zijkant van het gezicht en achter de oren. Een open naad in de nek maakt het mogelijk een pad te plaatsen voor maximale therapeutische effectiviteit. Hoewel het precieze type pad afhankelijk is van de toestand van de patiënt, wordt aanbevolen voor deze kinband de JoViPak Nekpad Peri-Auricular te gebruiken.

Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L en XL

Noot:

U kunt de bijpassende JoViPak Nekpad Peri-Auricular eenvoudig via hetzelfde bestelformulier bestellen.

Materiaal	Katoen/Lycra®	
Kleur	Ivory	

NEKPAD PERI-AURICULAIR



CONFECTIE:


Bedekt nek plus voor- en achterkant oor. Ontwikkeld om te worden gebruikt met de verlengde kinband of het gezichtsmasker. Deze pad heeft extensies voor zowel de voorste als de achterste delen van de oren en helpt bij het verminderen van (bilateraal) hoofd- en nekoedeem.

Noot:

Dit product kan niet los gebruikt worden.

Materiaal	Katoen/Lycra®	
Kleur	Ivory	

GEZICHTS- EN NEKMASKER

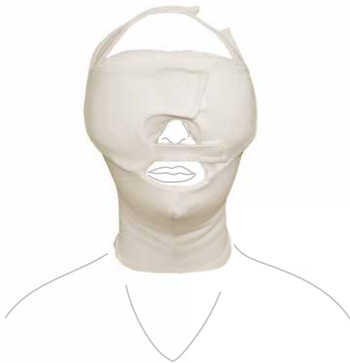

CONFECTIE:

Wanneer inzetbaar:

Voor oedeem in de nek, onderkaak en de zijanten van het gezicht. Het masker bedekt het hele gezicht, behalve de neus en de mond. Met klittenband aan de boven- en achterkant van het hoofd, bij de nek en boven de bovenlip. Met behulp van een oogpad kan extra druk rond de ogen gecreëerd worden. De verstelbare band langs de bovenste helft van het gezicht zorgt voor volledig zicht wanneer dat nodig is. Een open naad in de nek maakt het mogelijk een pad te plaatsen voor maximale therapeutische effectiviteit. Hoewel het precieze type pad afhankelijk is van de toestand van de patiënt, wordt aanbevolen voor dit masker de JoViPak Nekpad Peri-Auricular te gebruiken.

Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L en XL

Noot:

U kunt de bijpassende JoViPak Nekpad Peri-Auricular en Oogpad eenvoudig via hetzelfde bestelformulier bestellen.

Materiaal	Katoen/Lycra®	
Kleur	Ivory	

HALF GEZICHTS- EN NEKMASKER INCLUSIEF PADDING RECHTS



CONFECTIE:

Wanneer inzetbaar:

Voor oedeem in de nek, onderkaak en de zijkant van het gezicht. Het masker bedekt de wangen, oog en voorhoofd. Het klittenband bij de nek en aan de boven- en achterkant van het hoofd kan worden aangepast naar wens van de patiënt, waardoor het masker ook 's nachts kan worden gedragen. Het met versnipperde foam gevulde masker met gestikt patroon creëert wisselende puntdrukken.

Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L en XL

Noot:

*Dit product kan **niet** gecombineerd worden met een JoViPak Nekpad.*

Materiaal	Katoen/Lycra®	
Kleur	Ivory	

HALF GEZICHTS- EN NEKMASKER INCLUSIEF PADDING LINKS



CONFECTIE:

Wanneer inzetbaar:

Voor oedeem in de nek, onderkaak en de zijkant van het gezicht. Het bedekt de wangen, oog en voorhoofd. Het klittenband bij de nek en aan de boven- en achterkant van het hoofd kan worden aangepast naar wens van de patiënt, waardoor het masker ook 's nachts kan worden gedragen. Het met versnipperde foam gevulde masker met gestikt patroon creëert wisselende puntdrukken.

Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L en XL

Noot:

Dit product kan **niet** gecombineerd worden met een JoViPak Nekpad.

Materiaal	Katoen/Lycra®	
Kleur	Ivory	

OOGPAD (+ BAND)



CONFECTIE:

De JoViPak Oogpad is ontworpen om druk te geven op en rond de ogen. De Oogpad kan zowel op zichzelf als gecombineerd met het gezichts- en nekmasker gedragen worden.

Materiaal	Katoen/Lycra®	
Kleur	Ivory	

JOVIPAK ARMBANDAGE

**MAATWERK****Wanneer inzetbaar:**

Ontworpen voor effectief (lymf)oedeemmanagement van de arm gedurende de nacht. De armbandage stimuleert de afvoer van lymfevocht en helpt fibrotisch weefsel te verzachten. De meerlaagse constructie zorgt voor stabiliteit die huidplooien helpt overbruggen en zorgt voor stevigheid. De JoViPak armbandage is een duurzaam compressieproduct en kan bij zorgvuldig gebruik lang meegaan.

Beschikbaar in de volgende uitvoeringen:

Kanalen: Standaard of Slimline


Opties: Armbandage in één of twee delen, rits, gestikte vingers.

Combineer de armbandage altijd met een JoviJacket. U kunt de bijpassende JoViJacket eenvoudig via hetzelfde bestelformulier bestellen.

Arm					
AC1	AD	AE	AG	AG1	CG1

Materiaal	Polartec® Power Dry®	
Kleur	Black	Royal Blue
	Buff	Plum
	Pink	

JOVIJACKET ARMBANDAGE

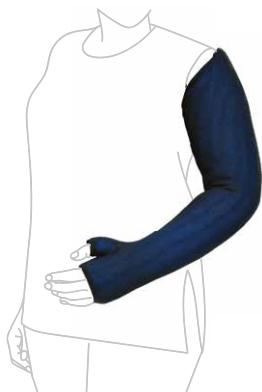**MAATWERK****Wanneer inzetbaar:**

Ontworpen voor extra compressie bij de JoViPak Armbandage. Vervang de JoViJacket na 6 maanden om optimale druk te behouden.

Beschikbaar in de volgende uitvoeringen:

In één of twee delen, afhankelijk van de armbandage.

Materiaal	Powernet	
Kleur	Black	White

JOVIPAK SCHOUDER-THORAX LINKS/RECHTS



Schouder-Thorax met thoraxpadding



Schouder-Thorax zonder thoraxpadding

MAATWERK:

Wanneer inzetbaar:

Ontworpen voor patiënten die een mastectomie of lumpectomie hebben ondergaan en naast oedeem in de arm ook oedeem rondom de schouder en/of het bovenlichaam hebben. De JoViPak Schouder-Thorax heeft drie ritsen om hem eenvoudiger aan te kunnen trekken: een middenvoor-thoracale rits, een onderarmrits van pols naar elleboog en een rits over de rug van het aparte handstuk.

Beschikbaar in de volgende uitvoeringen:

Type: Mastectomie, Lumpectomie, Reconstructie.

Kanalen: Standaard of Slimline, horizontaal of verticaal.

Opties: Met of zonder thoraxpadding, armbandage in één of twee delen, armsling, rits, gestikte vingers.

Combineer de schouder-thoraxbandage altijd met een JoviJacket. U kunt de bijpassende JoViJacket eenvoudig via hetzelfde bestelformulier bestellen.

Materiaal	Polartec® Power Dry®	
Kleur	Black 	Royal Blue 
	Buff 	Plum 
	Pink 	

JOVIJACKET SCHOUDER-THORAX



Schouder-Thorax met JoViJacket
Voor extra compressie

Wanneer inzetbaar:

Voor extra compressie bij de JoViPak Schouder-Thorax, voor maximale pasvorm en effectiviteit. Vervang de JoViJacket na 6 maanden om optimale druk te behouden.

Beschikbaar in de volgende uitvoeringen:

In één of twee delen, afhankelijk van het bestelde type Schouder-Thorax product.

Materiaal	Powernet	
Kleur	Black 	White 

JOVIPAK BUSTI



MAATWERK:

Wanneer inzetbaar:

Ontworpen voor patiënten die een lumpectomie hebben ondergaan en die oedeem of fibrose in de borst, borstwand en/of bovenrug hebben. De JoViPak Busti heeft een ritssluiting aan de voorkant. De Busti is minder geschikt voor patiënten met een cupmaat F of groter. In dat geval adviseren we om een Vest in te zetten.

Voor patiënten die een mastectomie hebben ondergaan adviseren wij het JoViPak Vest met eventueel een P-PI pad voor de ontbrekende borst.

De Busti wordt altijd in Slimline uitvoering geleverd waardoor deze overdag kan worden gedragen.

Combineer de Busti altijd met een JoviJacket. U kunt de bijpassende JoViJacket eenvoudig via hetzelfde bestelformulier bestellen.

Materiaal	Polartec® Power Dry®	
Kleur	Black 	Royal Blue 
	Buff 	Plum 
	Pink 	

JOVIJACKET BUSTI



MAATWERK:

Wanneer inzetbaar:

Voor extra compressie bij de JoViPak Busti. Vervang de JoViJacket na 6 maanden om optimale druk te behouden.

Materiaal	Powernet	
Kleur	Black 	White 

JOVIPAK VEST



MAATWERK:

Wanneer inzetbaar:

Ontworpen om de afvoer van overtollig lymfevocht in de borst, laterale borstkas en bovenrug te vergemakkelijken na een lumpectomie, mastectomie en andere borst- of rompoperaties. De middensluiting is van klittenband in 2 delen (gesplitst bij de taille). Voor optimaal therapeutisch effect wordt aangeraden een JOBST JoViJacket over het Vest te dragen. Het Vest kan doorlopen tot de rand van het bekken als de patiënt een natuurlijke taille heeft (kleinere omtrek bij de taille dan bij de heup). Als de patiënt geen natuurlijke taille heeft, dan wordt een Vest tot de onderste rib aangeraden.

Beschikbaar in de volgende uitvoeringen:

Kanalen: Standaard (met 4 soorten schuim) of Slimline (met 2 soorten schuim); verticaal of horizontaal.

Opties: Halve of volledige vulling, rits, kortere versie (tot de taille).

Combineer het Vest altijd met een JoviJacket. U kunt de bijpassende JoViJacket eenvoudig via hetzelfde bestelformulier bestellen.

Materiaal	Katoen/Lycra®		
Kleur	Black	☒	Ivory

JOVIJACKET VEST



MAATWERK:

Wanneer inzetbaar:

Voor extra compressie bij het JoViPak Vest, voor maximale pasvorm en effectiviteit. Vervang de JoViJacket na 6 maanden om optimale druk te behouden.


Materiaal	Powernet		
Kleur	Black	☒	White

BESTELADVIES JOVIPAK VEST

CONTINUOUS FLOW-KANALEN

Voor een maximaal therapeutisch effect is het belangrijk om de kanalen in de juiste richting te plaatsen, passend bij de indicatie en de richting van mogelijke lymfe-afvoer.

Kanaal opties

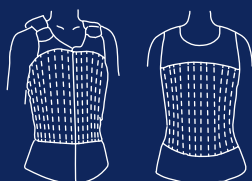


Voorkant

Achterkant

BILATERAAL (DUBBELE VULLING)

Voor patiënten die een dubbele mastectomie of lumpectomie hebben ondergaan en borstwandfibrose hebben. De foamvulling met verticale Continuous flow-kanalen bedekt de volledige romp tot onder de navel.

Vulling opties

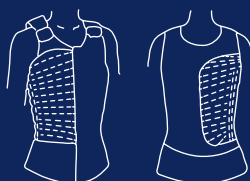

Voorkant

Achterkant

1/2 VULLING UNILATERAAL (HORIZONTAAL OF VERTICAAL)

Voor patiënten die een unilaterale mastectomie of lumpectomie hebben ondergaan en borstwandfibrose aan één kant hebben. De foamvulling met horizontale óf verticale Continuous flow-kanalen bedekt het hele gebied tussen borstbeen en ruggengraat. U bestelt deze rechts- of linkszijdig.

JOVIPAD BELISSE AXILLA MINI



CONFECTIE:

Wanneer inzetbaar:

Voor extra compressie in de oksel. Een losjes gevulde pad om seroomvorming tegen te gaan met een verlengstuk dat de afvoer van lymfevocht stimuleert. De pad kan in combinatie met het JoViPak Vest, een compressiebeha of compressiehemd gebruikt worden. De pad voelt zacht aan tegen de huid en is comfortabel dankzij de polsterende en vochtafvoerende materiaaleigenschappen.

Beschikbaar in de volgende maten:

S (70-75cm), M (80-85cm), L (90-95cm) en XL (100-110cm)

- omvang onder de borst gemeten

Noot:

Dit product kan niet los gebruikt worden.

Materiaal	Katoen/Lycra®	
Kleur	Buff	



JOVIPAD POST-MASTECTOMY



CONFECTIE:

Wanneer inzetbaar:

Voor patiënten die een mastectomie hebben ondergaan met borstwand-oedeem en/of stralingsfibrose over de voorste borstwand en de serratus anterior, maar met een normale lymfedrainage aan de niet-aangedane zijde. De pad bedekt de aangedane borstwand helemaal. Kan gebruikt worden onder een compressiehemd en is met name geschikt voor gebruik tijdens de nacht. De pad voelt zacht aan tegen de huid en is comfortabel dankzij de polsterende en vochtafvoerende materiaaleigenschappen.

Beschikbaar in de volgende maten:

S (70-75cm), M (80-85cm), L (90-95cm) en XL (100-110cm)

- omvang onder de borst gemeten

Noot:

Dit product kan niet los gebruikt worden.

Materiaal	Katoen/Lycra®	
Kleur	Buff	



JOVIPAD SERRATUS ANTERIOR



CONFECTIE:

Wanneer inzetbaar:

Voor patiënten die een mastectomie hebben ondergaan met oedeem en/of stralingsfibrose op de borstwand. Om lymfevocht lateraal naar de liesklieren en posterior richting ruggengraat af te voeren. Past in de meeste mastectomie- of compressiehemden of prothesebeha's (onder de prothese) en is met name geschikt voor gebruik overdag. De pad voelt zacht aan tegen de huid en is comfortabel dankzij de polsterende en vochtafvoerende materiaaleigenschappen.

Beschikbaar in de volgende maten:

S (70-75cm), M (80-85cm), L (90-95cm) en XL (100-110cm)

- omvang onder de borst gemeten

Noot:

Dit product kan niet los gebruikt worden.

Materiaal	Katoen/Lycra®	
Kleur	Buff	



JOVIPAD POST-LUMPECTOMY



CONFECTIE:

Wanneer inzetbaar:

Voor oedeem en/of stralingsfibrose van de aangedane borst en/of borstwand. De pad bedekt de aangedane borst volledig en strekt zich uit tot aan de wervelkolom. Past onder de meeste compressiehemden en is met name geschikt voor gebruik tijdens de nacht. De pad voelt zacht aan tegen de huid en is comfortabel dankzij de polsterende en vochtafvoerende materiaaleigenschappen.

Beschikbaar in de volgende maten:

S (46cm, cup A/B), M (50cm, cup C), L (55cm, cup D/DD), XL (66cm, cup E/F)

- lengte van borstbeen tot ruggengraat

Noot:

Dit product kan niet los gebruikt worden.

Materiaal	Katoen/Lycra®	
Kleur	Buff	



JOVIPAD BELISSE INFRAMAMMARY



CONFECTIE:

Wanneer inzetbaar:

Voor patiënten die een lumpectomie hebben ondergaan met oedeem en/of fibrose aan de onderzijde van de borst. De ellipsvormige pad loopt van de serratus anterior tot de processus xiphoideus en geeft zachte puntdruk-massage aan de onderzijde van de borst. De pad kan onder een compressiebeha gebruikt worden en is met name geschikt voor gebruik overdag. De pad voelt zacht aan tegen de huid en is comfortabel dankzij de polsterende en vochtafvoerende materiaaleigenschappen.

Beschikbaar in de volgende maten:

S (70-75cm), M (80-85cm), L (90-95cm) en XL (100-110cm)

- omvang onder de borst gemeten

Noot:

Dit product kan niet los gebruikt worden.

Materiaal	Katoen/Lycra®	
Kleur	Buff	

Deze JOBST JoViPads zijn ontworpen om comfort te bieden aan vrouwen en mannen die lijden aan oedeem en/of fibrose in de liesstreek en schaamlippen of scrotum. De met versnipperde foam gevulde pads creëren wisselende puntdrukken bij gebruik onder compressiekleding. De pads zijn ontworpen om de afvoer van lymfevocht te stimuleren en fibrotisch weefsel te verzachten.

JOVIPAD GENITALE PAD VROUW



CONFECTIE:

Wanneer inzetbaar:

De JoViPad Genitale pad voor vrouwen is ontworpen om oedeem en/of fibrose in de schaamlippen en/of de liezen te helpen verminderen. De voorzijde is ontworpen om tegelijkertijd een hysterectomielitteken te kunnen bedekken. De pad heeft elastiek aan de zijkanten zodat deze makkelijk op zijn plaats blijft zitten. De pad wordt bij voorkeur direct op de huid gedragen.

Beschikbaar in de volgende maten:

S (34-38), M (40-42), L (44-46) en XL (48-52) - confectiemaat kleding

Noot:

Combineer dit product altijd met een compressiebroek.

Materiaal	Katoen/Lycra®	
Kleur	Buff	

JOVIPAD GENITALE PAD MAN



CONFECTIE:

Wanneer inzetbaar:

De JoViPad Genitale pad voor mannen is ontworpen om oedeem en/of fibrose in het scrotum en/of de liezen te helpen verminderen. De pad heeft elastiek aan de zijkanten zodat deze makkelijk op zijn plaats blijft zitten. De pad wordt bij voorkeur direct op de huid gedragen.

Beschikbaar in de volgende maten:

S (28cm), M (36 cm), L (42cm) en XL (52cm) - omtrek onderzijde scrotum, van lies tot lies

Noot:

Combineer dit product altijd met een compressiebroek.

Materiaal	Katoen/Lycra®	
Kleur	Buff	

JOVIPAK BEENBANDAGE



MAATWERK:

Wanneer inzetbaar:

Ontworpen voor effectief (lymf)oedeemmanagement van het been gedurende de nacht. De beenbandage stimuleert de afvoer van lymfevocht en helpt fibrotisch weefsel te verzachten. De meerlaagse constructie zorgt voor stabiliteit die huidplooien helpt overbruggen en zorgt voor stevigheid.

Een JoViPak beenbandage is een duurzaam compressieproduct en kan bij zorgvuldig gebruik lang meegaan.

Beschikbaar in de volgende uitvoeringen:

4 blend, standaard kanalen.

Opties: Tot de tenen, rits.

Combineer de beenbandage altijd met een JoviJacket. U kunt de bijpassende JoViJacket eenvoudig via hetzelfde bestelformulier bestellen.

Been					
AB1	AD	AF1	AG	AG1	DG1

Materiaal	Polartec® Power Dry®			
Kleur	Black		Royal Blue	
	Buff		Plum	
	Pink			

JOVIJACKET BEENBANDAGE



MAATWERK:

Wanneer inzetbaar:

Voor extra compressie bij de JoViPak Beenbandage, met antislipzool. Vervang de JoViJacket na 6 maanden om optimale druk te behouden.

Materiaal	Powernet			
Kleur	Black		White	

JOVIPAK BOXER



MAATWERK:

Wanneer inzetbaar:

Voor patiënten met heup-, gluteaal of genitaal oedeem. De JoViPak Boxer kan met een JoViPak Beenbandage of JOBST Relax gecombineerd worden.

Ontworpen om de afvoer van lymfevocht en verzachting van fibrotisch weefsel te stimuleren.

Beschikbaar in de volgende uitvoeringen:

4 blend, standaard kanalen.

Combineer de Boxer altijd met een JoviJacket. U kunt de bijpassende JoViJacket eenvoudig via hetzelfde bestelformulier bestellen.

Materiaal	Polartec® Power Dry®	
Kleur	Black 	Royal Blue 
	Buff 	Plum 
	Pink 	

JOVIJACKET BOXER



MAATWERK:

Wanneer inzetbaar:

Voor extra compressie bij de JoViPak Boxer, al dan niet in combinatie met een beenbandage. Vervang de JoViJacket na 6 maanden om optimale druk te behouden.

Materiaal	Powernet	
Kleur	Black 	White 

JOVIPAK HIP HUGGER



MAATWERK:

Wanneer inzetbaar:

Ontworpen voor patiënten die hoog op het been tot in de heup oedeem hebben, om de afvoer van lymfevocht en verzachting van fibrotisch weefsel te stimuleren. Comfortabel dankzij het polsterend effect.

Beschikbaar in de volgende uitvoeringen:

4 blend, standaard kanalen.

Combineer de Hiphugger altijd met een JoviJacket. U kunt de bijpassende JoViJacket eenvoudig via hetzelfde bestelformulier bestellen.

Materiaal	Katoen/Lycra®		
Kleur	Black	☒	Ivory ☐

JOVIJACKET DG



MAATWERK:

Wanneer inzetbaar:

Voor extra compressie bij de JoViPak Hiphugger. Vervang de JoViJacket na 6 maanden om optimale druk te behouden.

Materiaal	Powernet		
Kleur	Black	☒	White ☐

JOVIPAD FOAM POP



CONFECTIE:

Wanneer inzetbaar:

De JoViPad Foam POP is ontworpen om lokaal druk te verhogen bij patiënten met lymfoedeem, andere vormen van oedeem en/of fibrose. Deze ovale pad is geschikt voor gebruik in de gevoelige knieholte of voorzijde van de enkel. De pad is ook geïndiceerd voor patiënten die lokaal extra druk nodig hebben, bijvoorbeeld op de voetrug of andere kleine gebieden met fibrose.

Beschikbaar in de volgende maten:

Eén maat: 12,5 x 20 cm

Noot:

Dit product kan niet los gebruikt worden.



Materiaal	Katoen/Lycra®	
Kleur	Buff	

JOVIPAD FOAM KDNY



CONFECTIE:

Wanneer inzetbaar:

De JoViPad Foam KDNY is ontworpen om lokaal extra druk te geven bij patiënten met lymfoedeem, andere vormen van oedeem en/of fibrose. Deze niervormige pad is geschikt voor gebruik in gebieden zoals de laterale borst ter hoogte van de oksel, de distale voorzijde van de knie, de binnenkant van het bovenbeen ter hoogte van de lies of de bovenzijde van het pubisgebied.

Beschikbaar in de volgende maten:

S 3x7 (7,5x18 cm), M 5x11 (12,5x28cm)

Noot:

Dit product kan niet los gebruikt worden.



Materiaal	Katoen/Lycra®	
Kleur	Buff	

JOBST PitPaks zijn speciaal ontwikkeld voor de behandeling van hardnekkige, langdurige fibrose of lipodermatosclerose. De PitPaks zijn gevuld met een speciale pitvulling die stevige massage van het aangedane gebied mogelijk maken. JOBST PitPaks zijn harder dan foampads en daarom wordt geadviseerd deze pads alleen onder toezicht van een therapeut te gebruiken. Begin met een toepassing van maximaal 15 minuten onder lichte compressie, of in combinatie met massage om de tolerantie te beoordelen. Bouw de toepassingstijd op op basis van tolerantie.

PITPAK CILINDER - VOLLEDIGE VULLING



Beschikbaar in de volgende maten:

SR-CYL-FP D6:	lengte 15 cm, omvang 18 - 23 cm
SR-CYL-FP D6.5:	lengte 16,5 cm, omvang 23 - 30,5 cm
SR-CYL-FP D8:	lengte 20,5 cm, omvang 28 - 38 cm
SR-CYL-FP D9:	lengte 23 cm, omvang 35,5 - 43 cm

Materiaal	Katoen/Lycra®, gevuld met kersenpitten	
Kleur	Buff	

PITPAK CILINDER - HALVE VULLING



Beschikbaar in de volgende maten:

SR-CYL-HP D7.5:	lengte 19 cm, omvang 18 - 25,5 cm
SR-CYL-HP D8.5:	lengte 21,5 cm, omvang 20,5 - 30,5 cm

Materiaal	Katoen/Lycra®, gevuld met kersenpitten	
Kleur	Buff	

PITPAK BASISVORM - ROND



Beschikbaar in de volgende maat:

RND 6: rond PitPak zonder kanalen, diameter 15 cm

Materiaal	Katoen/Lycra®, gevuld met kersenpitten	
Kleur	Buff	

PITPAK BASISVORM - RECHTHOEKIG



Beschikbaar in de volgende maat:

SR-REC-FP 6 x 9: rechthoek 15 x 23 cm

Materiaal	Katoen/Lycra®, gevuld met kersenpitten	
Kleur	Buff	

PITPAK INFRAMAMMARY



Beschikbaar in de volgende maten:

S (21,5x9cm), M (25,5x10cm), L (28x12cm)

Materiaal	Katoen/Lycra®, gevuld met kersenpitten	
Kleur	Buff	

PITPAK HANDPAKKING



Beschikbaar in de volgende maat:

DRSM 4 x 5: anatomisch gevormde PitPak, 10x12,5cm


Materiaal	Katoen/Lycra®, gevuld met kersenpitten	
Kleur	Buff	

BESTELINFORMATIE

U kunt de bestel- en receptformulieren voor de verschillende JOBST JoViPak producten op jobst.nl vinden. Voor uw gemak is alle benodigde informatie hierin opgenomen. Sommige bestelformulieren bevatten meerdere pagina's. Ook bevatten de formulieren informatie om de juiste maat te helpen bepalen.

In verband met de aard van maatwerkproducten is het niet mogelijk om deze achteraf aan te passen. Confectieproducten mogen alleen in de originele plastic verpakking gepast worden en eventueel omgeruild. Aangebroken verpakkingen worden niet retour genomen. Heeft u hulp nodig met uw bestelling? Neem dan vooral contact met ons op.

Voor informatie en bestellingen kunt u terecht op jobst.cs.nl@essity.com of telefoonnummer 030 - 69 84 700.

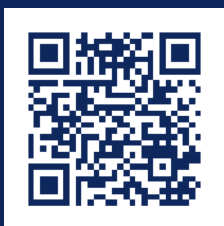

**Ga direct naar de
downloadpagina**

