

COMFORTABELE COMPRESSIE GEDURENDE DE NACHT

JOBST® Relax
Helpt om lymfoedeem te stabiliseren

NACHTCOMPRESSIE

Patiënten met lymfoedeem kunnen last krijgen van fluctuerend oedeem wat niet meer verdwijnt tijdens de nachtrust (ISL 2a*). Nachtcompressie helpt, in combinatie met dagcompressie, om oedeemfluctuatie tegen te gaan en kan een effectieve aanvulling zijn op de behandeling in de onderhoudsfase.

JOBST Relax is een innovatief compressieproduct dat speciaal is ontwikkeld voor gebruik gedurende de nacht en biedt patiënten:

- de mogelijkheid tot zelfmanagement
- een hoog draagcomfort voor een betere therapietrouw
- meer stabiliteit en controle over hun oedeem in combinatie met dagcompressie

JOBST® RELAX VOOR BEWEZEN COMFORT GEDURENDE DE NACHT¹

In een onderzoek zijn de ervaringen van patiënten met lymfoedeem met JOBST Relax tijdens rust en de nacht in kaart gebracht.



BETERE NACHTRUST

98%

98% van de patiënten beoordeelden hun nachtrust met goed tot zeer goed in vergelijking met andere compressieproducten voor de nacht.



OEDEEMREDUCTIE

90%


Veel patienten constateerden een afname van oedeem de volgende ochtend, waarbij **90%** aangaf dat na het dragen van JOBST Relax het aantrekken van de dagcompressie veel beter ging.



ADEMEND VERMOGEN

86%

86,8% vond JOBST Relax goed tot zeer goed in het voorkomen van warmtestuwing gedurende de nacht.

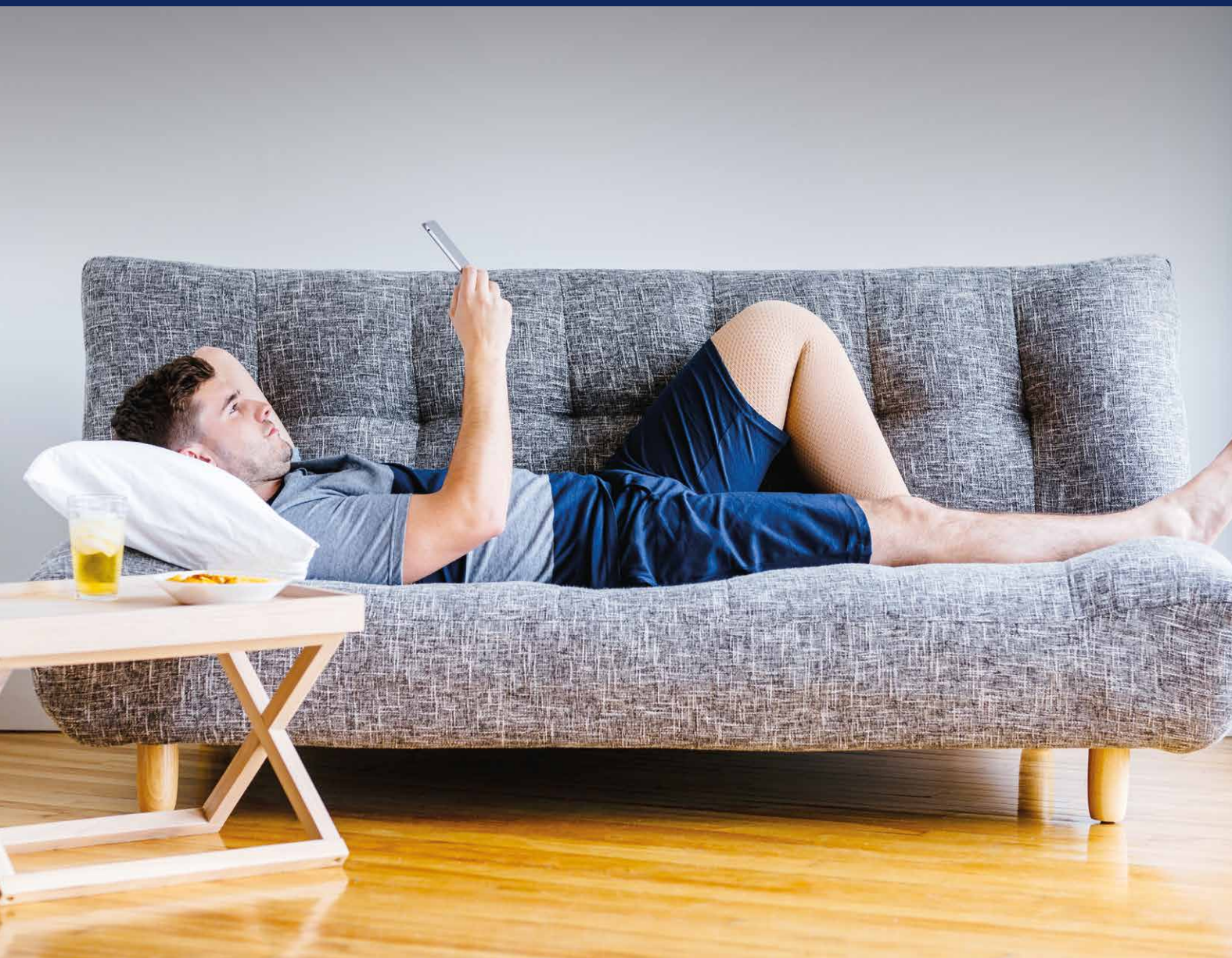

1. Bertsch, T. 2018, British Journal of Community Nursing, Vol. 23, No 11, P. 535 - 541

JOBST® RELAX

INNOVATIEF ONTWERP VOOR EEN **BETERE NACHTRUST** DANKZIJ ADEMEND VERMOGEN

JOBST Relax is een uniek product, waarvoor een **geheel nieuwe productietechniek** ontwikkeld is. Het product bestaat uit twee lagen materiaal met ribbelstructuur met daartussen een “comfortruimte” met verbindende vezels. Deze innovatieve “comfortruimte” zorgt ervoor dat JOBST Relax een **hoog ademend vermogen** heeft, soepel aanvoelt en **niet insnoert**. De verbindende vezels zijn licht en soepel waardoor het product makkelijk meebeweegt met de patiënt. Dit draagt bij aan een **goede nachtrust**. Ondanks het soepele karakter geeft JOBST Relax effectieve compressie in combinatie met een **hoge stiffness**.

Micromassage door de
speciaal ontworpen
oppervlaktestructuur



Micro-Massage

Extra zacht door unieke
productietechniek voor
meer comfort




Cushioning

Ademend vermogen
door speciale garens en
flexibele tussenlaag met
verbindende vezels



Breathable

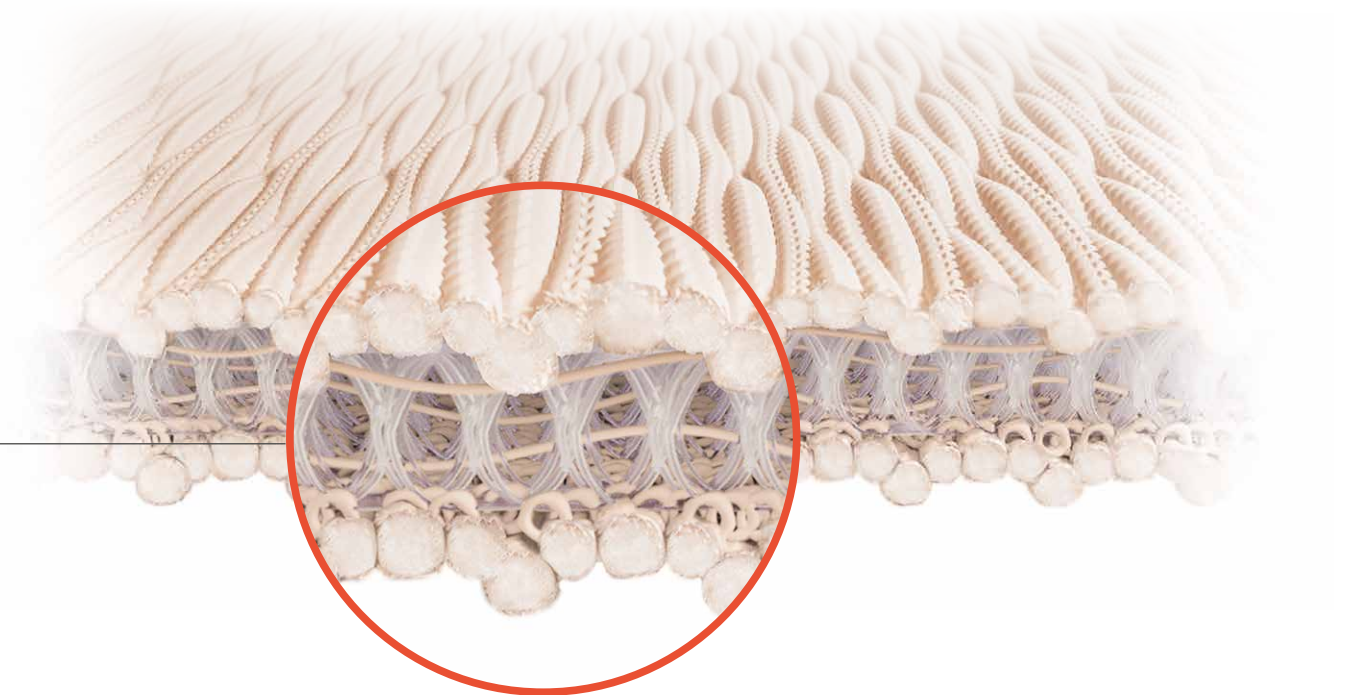

MEETTIPS

ALGEMEEN

- ✓ JOBST Relax heeft een gradueel aflopend drukpatroon. De druk ter hoogte van meetpunt B of C is dus hoger dan ter hoogte van meetpunt G. De massage-werking van het materiaal is daarom minder prominent op het bovenbeen of de bovenarm.
- ✓ Meet met behulp van een maatplank om zeker te zijn van accurate lengtematen. Ook bij herhalingsmetingen komt de maatplank van pas; u weet zeker dat u op dezelfde punten de omvang meet. Hierdoor zijn eventuele maatverschillen ook beter te controleren.
- ✓ Over het algemeen wordt JOBST Relax met aangetrokken meetlint gemeten. Hierdoor blijft de pasvorm ook na een aantal weken dragen behouden. Neem voor advies contact op met uw account manager.
- ✓ Het is gebruikelijk dat JOBST Relax iets afzakt tijdens de nacht. Dit is gerelateerd aan de afname van oedeem en heeft geen invloed op de therapie.

MAATNAME

- ✓ Meet **IA-B (AG1)** 1 cm langer dan bij een vlakbrei handschoen. Het handgedeelte valt dan net over de knokkels.
- ✓ Meet de **cX duim (AG1)** met een ruime lus. De duim fixeert JOBST Relax op de hand maar geeft geen druk.
- ✓ Meet **cG (arm én been)** strakker dan een vlakbreikous met siliconenboord. JOBST Relax sluit dan goed aan.
- ✓ Meet **cB (been)** zonder spanning bij een omvang kleiner dan 21 cm. Dit vergemakkelijkt het aantrekken.
- ✓ Meet **IA (been)** aan de mediale zijde om te voorkomen dat de voetlengte te kort wordt.
- ✓ Overweeg bij een **cF (been)** groter dan 72 cm de inzet van JOBST JoViPak.

JOBST® RELAX EN JOBST® JOVIPAK



JOBST® RELAX

Innovatief compressieverband voor de nacht

- Comfortabel dubbellaags materiaal met ribbelstructuur wat niet insnoert
- Zeer goed ademend vermogen
- Kan al ingezet worden bij beginnende fibrose
- Inzetbaar vanaf ISL 2a*



JOBST® JOVIPAK

Compressie voor complexe casuïstiek

- Foamdeeltjes van wisselende grootte zorgen voor puntsgewijze druk
- Ontworpen voor inzet bij (ver)gevorderde fibrose
- In uiteenlopende uitvoeringen verkrijgbaar, voor alle lichaamsdelen
- Inzetbaar vanaf ISL 2b*, pads vanaf ISL 2a*

LITE EN STRONG VARIANT

JOBST Relax is voor de onderste extremiteiten beschikbaar in twee varianten, Lite en Strong. De Lite variant wordt ingezet bij lichtere fibrosevorming en/of compressiebehoefte (ISL 2a). De Strong variant wordt ingezet bij zwaardere fibrosevorming en/of compressiebehoefte (ISL 2b).

*The diagnosis and treatment of peripheral lymphedema: 2016 consensus document of the International Society of Lymphology

PRODUCTASSORTIMENT JOBST® RELAX

Omschrijving			Bestel eenheid	Artikel- nummer	Z-index- nummer
Arm en hand 	LITE	Armbandage met handgedeelte (AG1) Beige	per stuk	76087-00	16346440
	LITE	Armbandage zonder handgedeelte (CG1) Beige	per stuk	76088-00	16346467
Onderbeen 	LITE	Onderbeenbandage (AD) Beige	per stuk	76095-00	16346300
		Onderbeenbandage met rits (AD) Beige	per stuk	76095-02	16346394
	STRONG	Onderbeenbandage (AD) Beige	per stuk	76097-00	16346378
		Onderbeenbandage met rits (AD) Beige	per stuk	76097-02	16346386
Gehele been 	LITE	Beenbandage tot de dij (AG) Beige	per stuk	76096-00	16346408
		Beenbandage tot de dij met rits (AG) Beige	per stuk	76096-02	16346424
	STRONG	Beenbandage tot de dij (AG) Beige	per stuk	76098-00	16346416
		Beenbandage tot de dij met rits (AG) Beige	per stuk	76098-02	16346432

Let op: iedere zorgverzekeraar hanteert een wisselend beleid ten opzichte van de vergoeding van nachtcompressieproducten. Check vooraf het beleid van de zorgverzekeraar.

Een rits verruimt de omvang met 2 cm en kan daardoor het aantrekken vergemakkelijken. Pas echter op bij patiënten met een kwetsbare huid, neuropathie of wonden. De rits kan achteraf niet verwijderd worden.

Wilt u meer informatie? Neem contact op of ga naar [JOBST.nl](https://www.jobst.nl)



JOBST® Relax wordt geleverd in een satijnen tas met trekkoord om het product beschermd in te bewaren. Tijdens het wassen kan gebruik worden gemaakt van een reguliere waszak.