



JOBST® FarrowWrap® knieverband met gebruikersinstructie

Het nieuwe knieverband is los, maar ook bij een bovenbeenverband beschikbaar in een Lite en Strong variant. Met behulp van drie banden is gemakkelijk en eenvoudig aan te brengen.

Ondersteuning en comfort

- In totaal drie banden maken het aanbrengen gemakkelijk en eenvoudig.
- In een zakje achter de knie kan eventueel het schuimkussentje worden geplaatst.

Aanpasbare compressie

- Dankzij de banden met klittenband kan het knieverband gemakkelijk worden aangepast, zowel door de zorgprofessional als de patiënt.
- Is geschikt voor fluctuerend oedeem.

Indicaties

- Lymfoedeem
- Chronisch oedeem

- Los verkrijgbaar
- Indien u het kniestuk los wilt bestellen is dit ook mogelijk. In onderstaande tabel vindt u de afmetingen, variant en de bij behorende bestelgegevens.

Maattabel		X-Small	Small	Medium	Large	X-Large
Bovenbeen		47-52 cm	53-59 cm	60-66 cm	67-73 cm	74-80 cm
Kuit		36-43 cm	42-50 cm	48-58 cm	53-63 cm	58-68 cm
LITE	Z-indexnummer	16593359	16593375	16593383	16593391	16593413
	Artikelnummer	73367-00	73367-01	73367-02	73367-03	73367-04
STRONG	Z-indexnummer	16593421	16593456	16593464	16593499	16593502
	Artikelnummer	73368-00	73368-01	73368-02	73368-03	73368-04



Comfort, Health and Style!



FarrowWrap® LITE

Informationen zu US-amerikanischen und internationalen Patenten unter:
U.S. & International patent information at:
Informations relatives aux brevets U.S. & internationalux sur :
Información sobre patentes en los EE. UU. y otros países en:
Informazioni sul brevetto US e internazionale in:
U.S. & internationale informatie over patenten kunt u vinden op:
Informação sobre patente americana e internacional:
Information om patent i USA och internationellt finns på:
Opplysninger om amerikanske og internasjonale patenter på:
Patentoplysninger for USA & internationalt:
Katso Yhdysvaltoja ja muita maita koskevat patenttitiedot osoitteesta:

www.farrowmed.com/patents

Wichtig – Bitte die Anweisungen zum Anlegen im Inneren lesen.
Please read important donning instructions inside.
Veuillez lire les instructions importantes concernant l'enfilage figurant à l'intérieur de l'emballage.
Lea atentamente las instrucciones de colocación adjuntas en el interior.
Per cortesia leggere le istruzioni per indossare l'articolo contenute all'interno.
Belangrijk: Lees alstublieft vooraf de aantrekinstructies in de verpakking.
Leia as instruções de aplicação importantes no interior da embalagem.
Läs de viktiga anvisningarna om påtagning i foldern.
Les viktig påføringsinstruksjoner på innsiden.
Læs venligst vedlagte vigtige påtagningsanvisninger.
Lue tärkeät pukemisohjeet sisäpuolelta.


BSN medical Inc.
5825 Carnegie Blvd.
Charlotte, NC 28209
USA

BSN medical GmbH
Outckbornstrasse 24
20253 Hamburg
Germany

© 2017 Farrow Innovations LLC
Made in Mexico



JBR11494.01 16511-90072-00 REV 10/17

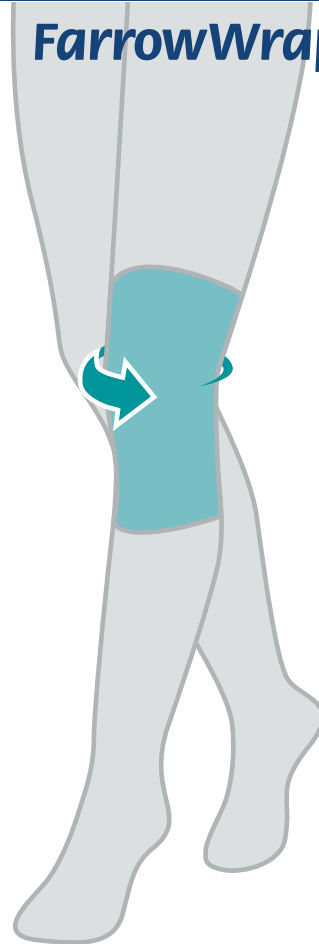

Ready-to-Wear

20-30 mmHg

Knieverband
Kneepiece
Bande de genou
Pieza para la rodilla
Benda per ginocchio
Knieverband
Joelheira
Knädel
Knedel
Knæbandage
Polvituki

Aanwijzingen voor gebruik

VOORDELEN

Geniet van de voordelen waardoor u meer vrijheid krijgt om van het leven te genieten:

1. Gemakkelijk toe te passen en te verwijderen
2. Kan fluctuaties in de zwelling opvangen
3. Aanvulling voor producten van het merk JOBST® FarrowWrap®, zoals het JOBST® FarrowWrap® STRONG-beenverband en -voetverband
4. Het knieverband wordt geleverd met een ruimte voor een optioneel schuimkussen voor ondersteuning en bescherming van het gevoelige gebied van de knieholte

INDICATIES

Alleen voor gebruik in combinatie met het FarrowWrap®-bovenbeenverband LITE van JOBST®.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het FarrowWrap®-bovenbeenverband LITE van JOBST®.

AANBRENGINSTRUCTIES

Open wonden moeten worden afgedekt voordat de onderkous wordt toegepast.

1. Pas een dijhoge onderkous en een FarrowWrap®-bovenbeenverband LITE van JOBST® toe en volg daarbij de aanbrenginstructies zoals ze staan vermeld in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.
2. Neem vervolgens het knieverband, wikkel het los en controleer of het witte label naar u toe is gekeerd. **AFB. 1**
3. Plaats de middelste band van het knieverband onder de knie (met of zonder het schuimvulling).
4. Wikkel de middelste band rond de knie door matige trekkracht* uit te oefenen; bevestig de band met het klittenband. **AFB. 2**
5. Breng de resterende banden op dezelfde wijze aan en strijk plooiën tijdens het plaatsen glad.
6. Vouw de onderkous naar beneden over de bovenkant van het bovenbeenverband.
7. Vouw bij het verwijderen van het bovenbeenverband en/of het knieverband het klittenband over zichzelf heen en terug op dezelfde band. 

Als u vragen hebt, neem dan contact op met uw zorgverlener of uw leverancier van producten van JOBST®FarrowWrap®.

* dit komt overeen met het uittrekken van het materiaal met 15%

NB:

De eerste keer van het aantrekken van het compressiesysteem wordt uitgevoerd onder supervisie om ehet juiste compressieniveau te bepalen op basis van de behoeften en gevoeligheid van de patiënt

Als de patiënt met het compressiesysteem om tekenen van pijn, minder kleur of gevoelloosheid vertoont, moet het compressiesysteem worden verwijderd.



AFB. 1



AFB. 2

	Beenontrek				
	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large
Boven de knie	47-52 cm	53-59 cm	60-66 cm	67-73 cm	74-80 cm
Kuit	36-43 cm	42-50 cm	48-58 cm	53-63 cm	58-68 cm

De lengtematen hebben een marge van 2 cm naar boven en naar beneden.

Deze maattabel is specifiek gemaakt voor gebruik bij patiënten in Nederland.

VERZORGING

 In de machine met koud water wassen

 In de droger drogen, geen warmte

 Niet Bleken

 Niet strijken

 Niet chemisch reinigen

Gebruik een mild wasmiddel zonder bleekmiddel

Steek geen vingernagels in het materiaal

Gemaakt van nylon en spandex.

Niet gemaakt met natuurlijke rubberlatex.

Dit product is gefabriceerd in Mexico.

Velcro® is een geregistreerd handelsmerk van Velcro Industries BVBA.

JOBST[®]
Comfort, Health and Style!

JOBST[®]
FarrowWrap[®] **STRONG**

Informationen zu US-amerikanischen und internationalen Patenten unter:
U.S. & International patent information at:
Informations relatives aux brevets U.S. & internationalux sur :
Información sobre patentes en los EE. UU. y otros países en:
Informazioni sul brevetto US e internazionale in:
U.S. & internationale informatie over patenten kunt u vinden op:
Informação sobre patente americana e internacional:
Information om patent i USA och internationellt finns på:
Opplysninger om amerikanske og internasjonale patenter på:
Patentoplysninger for USA & internationalt:
Katso Yhdysvaltoja ja muita maita koskevat patenttitiedot osoitteesta:

www.farrowmed.com/patents

Wichtig – Bitte die Anweisungen zum Anlegen im Inneren lesen.
Please read important donning instructions inside.
Veuillez lire les instructions importantes concernant l'enfilage figurant à l'intérieur de l'emballage.
Lea atentamente las instrucciones de colocación adjuntas en el interior.
Per cortesia leggere le istruzioni per indossare l'articolo contenute all'interno.
Belangrijk: Lees alstublieft vooraf de aantrekinstructies in de verpakking.
Leia as instruções de aplicação importantes no interior da embalagem.
Läs de viktiga anvisningarna om påtagning i foldern.
Les viktige påføringsinstruksjoner på innsiden.
Læs venligst vedlagte vigtige påtagningsanvisninger.
Lue tärkeät pukemisohteet sisäpuolelta.

BSN medical Inc.
3825 Carnegie Blvd.
Charlotte, NC 28209
USA


BSN medical GmbH
Quickbornstrasse 24
20253 Hamburg
Germany

© 2017 Farrow Innovations LLC
Made in Mexico



JBR11493.02 16511-90071-00 REV 10/17

BSNmedical

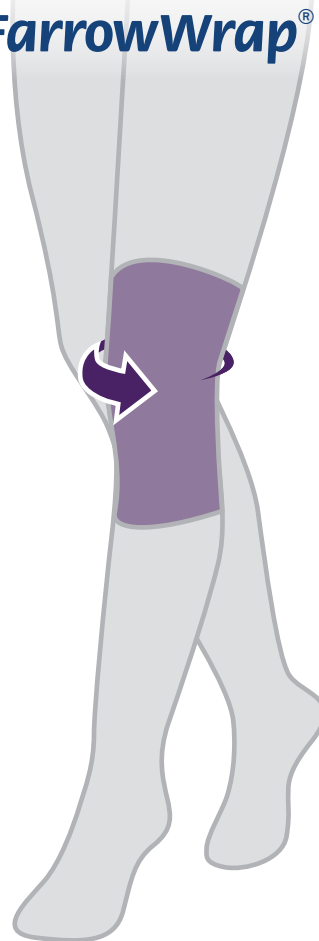

Ready-to-Wear

30-40 mmHg

Knieverband
Kneepiece
Bande de genou
Pieza para la rodilla
Benda per ginocchio
Knieverband
Joelheira
Knädel
Knedel
Knæbandage
Polvituki

NL Aanwijzingen voor gebruik

VOORDELEN

Geniet van de voordelen waardoor u meer vrijheid krijgt om van het leven te genieten:

1. Gemakkelijk toe te passen en te verwijderen
2. Kan fluctuaties in de zwelling opvangen
3. Aanvulling voor producten van het merk JOBST® FarrowWrap®, zoals het JOBST® FarrowWrap® STRONG-beenverband en -voetverband
4. Het FarrowWrap®-knieverband STRONG van JOBST® mag alleen worden gebruikt in combinatie met een FarrowWrap®-bovenbeenverband STRONG van JOBST® of een FarrowWrap®-bovenbeenverband CLASSIC van JOBST® en kan worden aangevuld met extra producten van het merk FarrowWrap® van JOBST®, zoals het FarrowWrap®-beenverband en/of -voetverband van JOBST®.

- Als de patiënt met het compressiesysteem om tekenen van pijn, minder kleur of gevoelloosheid vertoont, moet het compressiesysteem worden verwijderd.

INDICATIES

Alleen voor gebruik in combinatie met het FarrowWrap®-bovenbeenverband STRONG van JOBST® of het FarrowWrap®-bovenbeenverband CLASSIC van JOBST®.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het FarrowWrap®-bovenbeenverband STRONG of CLASSIC van JOBST®.

AANBRENGINSTRUCTIES

Open wonden moeten worden afgedekt voordat de onderkous wordt toegepast.

1. Pas een dijhoge onderkous en een FarrowWrap®-bovenbeenverband STRONG/CLASSIC van JOBST® toe en volg daarbij de aanbrenginstructies zoals ze staan vermeld in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.
2. Neem vervolgens het knieverband, wikkel het los en controleer of het witte label naar u toe is gekeerd. AFB. 1
3. Plaats de middelste band van het knieverband onder de knie (met of zonder het schuimvulling).
4. Wikkel de middelste band rond de knie door matige trekkracht* uit te oefenen; bevestig de band met het klittenband AFB. 2
5. Breng de resterende banden op dezelfde wijze aan en strijk plooiën tijdens het plaatsen glad.
6. Vouw de onderkous naar beneden over de bovenkant van het bovenbeenverband.
7. Vouw bij het verwijderen van het bovenbeenverband en/of het knieverband het klittenband over zichzelf heen en terug op dezelfde band.

Als u vragen hebt, neem dan contact op met uw zorgverlener of uw leverancier van producten van JOBST® FarrowWrap®.

* dit komt overeen met het uittrekken van het materiaal met 15%

NB:

- De eerste keer van het aantrekken van het compressiesysteem wordt uitgevoerd onder supervisie om het juiste compressieniveau te bepalen op basis van de behoeften en gevoeligheid van de patiënt



ABB. 1



ABB. 2

Beenomtrek

	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Boven de knie	47-52 cm	53-59 cm	60-66 cm	67-73 cm	74-80 cm	81-87 cm
Kuit	36-43 cm	42-50 cm	48-58 cm	53-63 cm	58-68 cm	63-73 cm

De lengtematen hebben een marge van 2 cm naar boven en naar beneden.

Deze maattabel is specifiek gemaakt voor gebruik bij patiënten in Nederland.

VERZORGING

 In de machine met koud water wassen

 In de droger drogen, geen warmte

 Niet Bleken

 Niet strijken

 Niet chemisch reinigen

Gebruik een mild wasmiddel zonder bleekmiddel
Steek geen vingernagels in het materiaal

Gemaakt van nylon en spandex.

Niet gemaakt met natuurlijke rubberlatex.

Dit product is gefabriceerd in Mexico.

VELCRO® is een geregistreerd handelsmerk van Velcro BVBA.