



JOBST® FarrowWrap® teenverband met gebruikersinstructie

Teenverband van JOBST FarrowWrap het teenverband voor onder een JOBST FarrowWrap voetverband.

JOBST FarrowWrap teenverband kan ingezet worden bij lichte mate van oedeemvorming in de voorvoet en tenen. Het is speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met het JOBST FarrowWrap voetverband. Tevens is het JOBST FarrowWrap teenverband in te zetten onder een therapeutische elastische kous.

Kenmerken

- Aangenaam dun materiaal met mooie gladde naden
- Aanpasbaar door op de juiste lengte af te knippen
- Omkeerbaar, waardoor het teenverband links als rechts te dragen is
- In te zetten voor compressietherapie overdag en 's nachts

Indicaties

- Lymfoedeem
- Veneus oedeem
- Posttraumatisch oedeem
- Postoperatief oedeem

JOBST FarrowWrap teenverband					
Z-indexnummer		16635175	16635183	16635191	16635205
Artikelnummer		72947-00	72947-01	72947-02	72947-03
Maat		XS	S	M	L
cA		20-22 cm	22-24 cm	24-26 cm	26-28 cm



Comfort, Health and Style!

Informationen zu US-amerikanischen und internationalen Patenten unter:
 U.S. & International patent information at:
 Informations relatives aux brevets U.S. & internationaux sur:
 Información sobre patentes en los EE. UU. y otros países en:
 Informazioni sul brevetto US e internazionale in:
 U.S. & internationale informatie over patenten kunt u vinden op:
 Informação sobre patente americana e internacional:
 Information om patent i USA och internationellt finns på:
 Opplysninger om amerikanske og internasjonale patenter på:
 Patentoplysninger for USA & internasjonalt:
 Katso Yhdysvaltoja ja muita maita koskevat patentitiedot osoitteesta:

www.farrowmed.com/patents

Wichtig – Bitte die Anweisungen zum Anlegen im Inneren lesen.
 Please read important donning instructions inside.
 Veuillez lire les instructions importantes concernant l'enfilage figurant à l'intérieur de l'emballage.
 Lea atentamente las instrucciones de colocación adjuntas en el interior.
 Per cortesia leggere le istruzioni per indossare l'articolo contenute all'interno.
 Belangrijk: Lees alstublieft vooraf de aantrekinstructies in de verpakking.
 Leia atentamente as instruções de utilização no interior da embalagem.
 Läs de viktiga anvisningarna om påtagning i foldern.
 Les vedlagt bruksanvisning för bruk.
 Læs venligst vedlagte vigtige påtagningsanvisninger.
 Lue tärkeät pukemisohjeet sisäpuolelta.

Fiber content:
 59% Nylon
 41% Spandex



BSN medical Inc.
 5825 Carnegie Blvd.
 Charlotte, NC 28209
 USA

BSN medical GmbH
 Quickbornstrasse 24
 20253 Hamburg
 Germany


© 2018 BSN Medical GmbH
 Made in Mexico
www.bsnmedical.com



JBR10729.02 16511-90083-00 REV 09/18



Farrow® Toe Cap

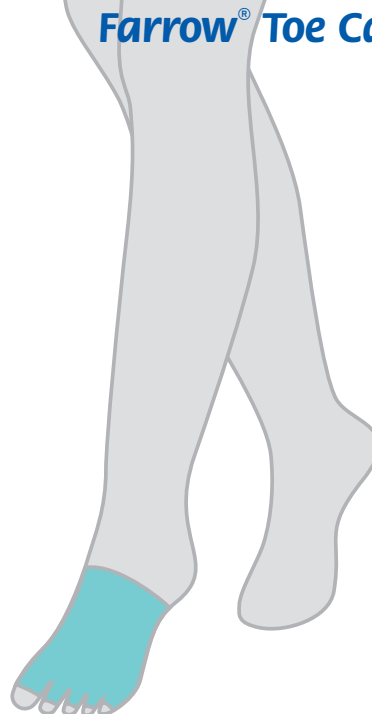

Ready-to-Wear

20-30 mmHg

Zehenkappe
 Toe Cap
 Couvre-orteils
 Guante de pie
 Calottina Piede
 Voorvoetbandage
 Biqueira
 Tástrumpa
 Táhettien
 Tákappe
 Hoitosukka

Aanwijzingen voor gebruik

VOORDELEN

Profiteer van de unieke voordelen van uw nieuwe JOBST® Farrow confectie-voorvoetbandage:

1. Sluit aan op producten van het merk JOBST® FarrowWrap®
2. Kan aan beide voeten worden gebruikt
3. Biedt een compressie van 20-30 mmHg
4. Duurzaam en comfortabel: fijne naden met ultradun en glad compressiemateriaal

INDICATIES

Voor de controle van een lichte tot matige zwelling van de voorvoet en teen door een acute en chronische oedeemaandoening, een lymfatische aandoening of andere aandoeningen met zwellingen als gevolg. Volg de instructies van uw arts/behandelaar op.

VOORZORGSMAATREGELEN

Het product kan niet worden gebruikt in het geval van:

- Huidinfectie of afscheiding
- Lichte tot matige arteriële aandoening
- Allergische reactie van enig type op het materiaal
- Gevoelloze voet of gevoelloze tenen (perifeer neuropathie)
- Immobielheid
- Anamnese van bloedpropen in de benen
- Gecontroleerd congestief hartfalen
- Grote bunions

Tijdens het lopen moeten geschikte schoenen worden gedragen om vallen te helpen voorkomen.

CONTRA-INDICATIES

De JOBST® Farrow voorvoetbandage is gecontra-indiceerd (mag NIET worden gedragen) bij de volgende medische aandoeningen:

- Ernstige arteriële aandoening
- Matige arteriële aandoening bij de aanwezigheid van perifere neuropathie
- Onbehandelde aderonsteking (septische flebitis)
- Onbehandelde en/of progressieve huidinfectie (cellulitis)
- Grote bloedprop in de ader (phlegmasia coerulea dolens)
- Ongecontroleerd congestief hartfalen

GARANTIE

Tijdens het bewaren moeten de producten tegen extreme temperaturen en direct zonlicht worden beschermd. Zes maanden garantie op materiaal- en productiefouten vanaf de aankoopdatum door de eindgebruiker. Wij behouden ons het recht voor het product naar eigen goeddunken te repareren/vervangen. Geen restitutie bij op maat gemaakte kledingstukken. Voor wijzigingen van op maat gemaakte kledingstukken kunnen aanvullende kosten in rekening worden gebracht. De garantie vervalt als het product is gewijzigd door iemand anders dan BSN medical. De garantie geldt niet voor normale slijtage of misbruik, inclusief, maar niet beperkt tot onjuiste zorg.

SAMENSTELLING

Gemaakt van polyamide en elastaan. Niet gemaakt van natuurlijk rubberlatex. Voor het therapeutische effect van het kledingstuk is een correcte pasvorm nodig. Dit product is gemaakt in Mexico.

DE TEENVERBAND AANTREKKEN

Open wonden moeten worden bedekt voordat u de voorvoetbandage aantrekt. Verwijder eventuele sieraden.


De voetkap kan aan de rechter- of linkervoet worden gedragen.

worden:

- A. Rechts: het label zit aan de buitenkant
- B. Links: draai de voetkap binnenste buiten (het label zit aan de binnenzijde)


Volg deze stappen bij het aantrekken van je voetkap:

1. Steek uw voet door de opening van de bandage. Afb. 1
2. Positioneer de voorvoetbandage zodanig dat deze comfortabel over de tenen en voet zit. Afb. 2 en 3
3. Trek de bandage tussen uw tenen om tussenruimte te creëren. Afb. 4
4. Wanneer het materiaal bij het teengedeelte te lang is, markeer het teengedeelte dan op de juiste lengte, verwijder de voetkap en knip de lengte van het teengedeelte tot het gemarkeerde gebied en trek de voetkap opnieuw aan.
5. Neem bij vragen contact op met uw arts/behandelaar of de leverancier van JOBST® Farrow.

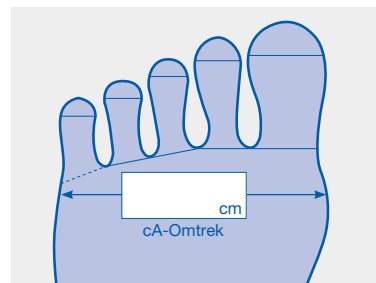

Maat	XS	SM	MD	LG
cA	20-22 cm	22-24 cm	24-26 cm	26-28 cm

* De gemiddelde compressie voor een doorsnee voetgrootte met de gerelateerde afmetingen.

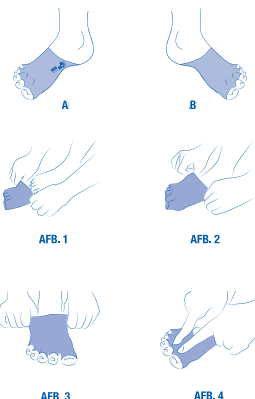

VERZORGING

Machine was op 40° C

Niet Bleken

Niet in de droogtrommel

Liggend drogen

Niet strijken

Niet chemisch reinigen