



Comfort, Health and Style!

JOBST® JOVIPAK BROCHURE



THERAPIES. HAND IN HAND.



INLEIDING

Halverwege de jaren tachtig ontdekte Bernd Schneider, lymfoedeemtherapeut bij de Földi kliniek in Duitsland, dat de werkzaamheid van CDP (Complete Decongestive Physiotherapie) sterk verbeterde door het plaatsen van stukjes schuim onder korte rek zwachtels, tijdens de behandeling van lymfoedeem. De verschillende drukken, door de schuimstukjes gecreëerd, verzachtte het fibrotische weefsel. Zijn ingenieuze ontdekking staat aan de basis van alle huidige lymfoedeem bandages.

Een lid van JoAnn Rovig's lymfoedeem supportgroep te Seattle werd met succes behandeld door een Casley-Smith therapeut. Zij liet de "chip zak" aan JoAnn Rovig zien in 1992. Het jaar daarop reisde JoAnn naar Australië om te trainen met de artsen die deze techniek gebruikten in hun onderwijs: Judith Casley-Smith en haar (inmiddels overleden) echtgenoot John.

JoAnn bracht de technologie over naar haar eigen lymfoedeemkliniek en begon handgemaakte "chip zakken" te maken voor haar eigen patiënten. Later dat jaar, was Bernd Schneider te gast in de kliniek van Dr Lerner's in New York, waar hij zijn eigen "Schneider Packs" introduceerde voor Dr Lerner's patiënten.

JoAnn's Innovatie

JoAnn beseftte dat therapeuten geen tijd hadden om voor iedere patiënt persoonlijk "chip zakken" te maken. Tegelijkertijd zag ze de noodzaak om het bandageren te vereenvoudigen, vooral in verband met therapietrouw van patiënten. Daartoe ontwierp JoAnn eenvoudig aan te trekken bandages (op basis van afgebroken schuimstukjes), die onder een compressieverband kunnen worden gedragen, waardoor het 's nachts zwachtelen overbodig gemaakt werd.

Deze bandages waren een dusdanige doorbraak in de oedeemtherapie dat er een nieuwe naam bedacht werd om ze te beschrijven: JoViPaK, een samentrekking van lettergrepen uit haar naam (Joann Rovig) aangevuld met "pak". Begin 2016 is JoViPak een onderdeel van het JOBST assortiment geworden van BSN medical.

Werking

De onregelmatige foam-chip schuimvulling in JoViPak producten verzachten het fibrotisch weefsel door afwisselende hoge- en lage druk. De massage door de drukwisselingen vermindert oedeem en voorkomt fibrose.

Voordelen

JOBST JoViPak producten worden ook gebruikt om uitstekende botdelen te beschermen, bijvoorbeeld de tibia rand en de rug van de voet. Ze zijn zeer nuttig bij behandeling van borst-, borstwand, en genitaal lymfoedeem. Ze werken goed in de anatomische uitsparingen rond de enkel en knie. meerder therapeuten en patiënten gebruiken JoViPak producten onder de manchetten van IPC-apparatuur.

Informatie bij bestellingen

Voordat u met het aanmeten van JoViPak Producten begint is het belangrijk de formulieren goed door te lezen. Voor het aanmeten van confectie producten kunt u de bijbehorende tabellen hanteren om de juiste maat te bepalen en te bestellen. Voor maatwerkbestellingen dient u in de meeste gevallen meerdere formulieren in te vullen. Op het maatwerkformulier staat aangegeven welke formulieren meegestuurd dienen te worden.

Alle maatwerkproducten worden met de grootste precisie gemaakt en kunnen achteraf niet aangepast worden. Daarom is het belangrijk dat alle maten goed en volledig ingevuld worden alvorens u de formulieren naar ons toestuurt. U treft alle formulieren aan op onze website: www.jobst.nl

GARANTIE

JOBST JoViPak verbanden hebben een garantie van **zes maanden** voor fouten in materialen en productie bij normaal gebruik en zorg.

JOBST JoViJackets™ en **Box Gloves** hebben een garantie van **drie maanden**.

RUILEN OF RETOURNEREN

Confectie (Standaard maten)

Voor JoViPak confectie artikelen geldt een **retourneringsbeleid van tien dagen**, mits de producten **in een ongeopende verpakking** worden geretourneerd.

Maatwerk

JOBST JoViPak producten gemaakt volgens klantspecificaties op maat kunnen **niet worden geretourneerd**.

Voor informatie en bestellingen kunt u terecht op jovi@bsnmedical.com of telefoonnummer **036 - 53 89 597**.



COMPRESSIE WAAR DAT NODIG IS MET JOBST® JOVIPAK

OPLOSSINGEN VOOR HET HELE LICHAAM

Het onder controle houden van lymfoedeem gedurende de nacht is een uitdaging voor de patiënt en behandelaar. **JOBST® JoViPak** producten zorgen voor puntdruk om het fibrotisch weefsel te verzachten en het oedeem onder controle te houden. De aanbevolen **JoViJacket** biedt aanvullende compressie voor een optimaal therapeutisch resultaat.

Hoofd en Nek

- Standaard en verlengde kinband
- Half- en volledig gezichtsmasker
- JoViPak Pads Nek
- JoViPak Pads Oog

Torso

- Schouder - Thorax verband
- Vest
- Busti

Schaamstreek

- Genitale pads (zowel voor mannen als voor vrouwen)

Bovenste ledematen

- JoViPak Classic armverband
- JoViLiners armverband
- Armverband in twee delen
- Vingerverband/palm JoViPad (gestikt)
- Gecombineerd armverband voor overdag
- Handverband in Box Glove in combinatie met JoViPad

Onderste ledematen

- JoViPak Classic beenverband – hele been
- JoViPak Classic beenverband – onderbeen
- JoViLiners – hele been en onderbeen
- Hip Hugger
- Beenverband – op maat gemaakt (AF1)
- Beenverband – op maat gemaakt (DG1)
- Boxer Short

JOBST® JoViPads en JOBST® PitPaks kunnen voor behandeling overal op het lichaam worden gebruikt.



“ COMFORTABELE EN EFFECTIEVE VERBANDEN
VOOR DE VERZORGING VAN LYMFOEDEEM ”

INHOUD

1. Materialen	9
JoViPak materiaal opties	10
Polartec® Powerdry®	11
2. Assortiment bovenlichaam	13
Confectie	
JoViLiners Arm	14
JoViPak Arm	15
JoViPak Box Glove	16
JoViPak Hoofd, Nek en Kin	17
JoViPads Borst en Borstwand	19
JoViPads	20
PitPaks	21
Maatwerk	
JoViPak Arm	23
JoViPak Schouder - Thorax	24
JoViPak Vest	25
JoViPak Busti	26
3. Assortiment onderlichaam	27
Confectie	
JoViLiners Been	28
JoViPak Been	29
JoViPak Pads genitaal	30
Maatwerk	
JoViPak Been	31
JoViPak Hip Hugger	32
JoViPak Boxershort	33
4. Patiëntinformatie	35
Aan- en uittrekinstructies	36
Was- en drooginstructies	39
5. Aanmeetinstructies	41
Het opmeten van de arm	42
Het opmeten van het been	45
6. Bestellen	49



1. MATERIALEN

JOVIPAK OPTIES*

JoViPak stoffen	Kleuropties		
Polartec® Powerdry® 100% polyester, zacht en ademend	● Black	● Buff	● French blue
	● Glacier Blue	● Leaf Green	● Navy blue
	● Pink	● Plum	● Royal blue
	● Stainless steel	● White (zacht roze tint)	
Polartec® Powerdry® "Silkweight" Zijdezacht Polartec®, ideaal in combinatie met de Slimline optie; voor de zeer gevoelige huid.	● Black	● Blue Ridge	
Katoen/Lycra® 90% katoen/10% Lycra®, heeft iets meer rek dan Polartec® Powerdry®	● Black	● Royal Blue	● Ivory
Nylon/Spandex® Sterk materiaal met beperkte rek. Geeft extra compressie. Dit materiaal wordt gebruikt in "JOBST JoViJacket™"	● Black		
Techsheen Lichtgewicht nylon/Spandex. Zacht materiaal met beperkte rek. het geeft stevige compressie. Dit materiaal wordt onder andere in de Box Gloves gebruikt.	● Black	● Ivory/buff	

JoViPak schuim

- Bromidevrij en veilig
- Mengsel van twee tot vier soorten zeer veerkrachtig polyurethaan, onregelmatig van structuur en grootte

JOBST PitPaks

De PitPaks zijn voor 100% van natuurlijk materiaal. JOBST PitPaks worden niet vergoed en dient de patiënt zelf te betalen.

Low ILD foam

Minder hard schuim. Voor de zeer gevoelige huid.

Slimline

Meer kanalen met minder schuim, waardoor dunner.

* Zie het bestelformulier van het product voor meer informatie


POLARTEC® POWERDRY®

UNIEKE KENMERKEN EN PLUSPUNTEN

Voortdurende afvloeiing.

Continuous Flow ondersteunt de drainage van lymfevocht.

JoViPak wordt gemaakt van Polartec® Powerdry®. Dit materiaal bestaat uit speciale microvezels en heeft een unieke gasstructuur wat ervoor zorgt dat het materiaal snel opdroogt.

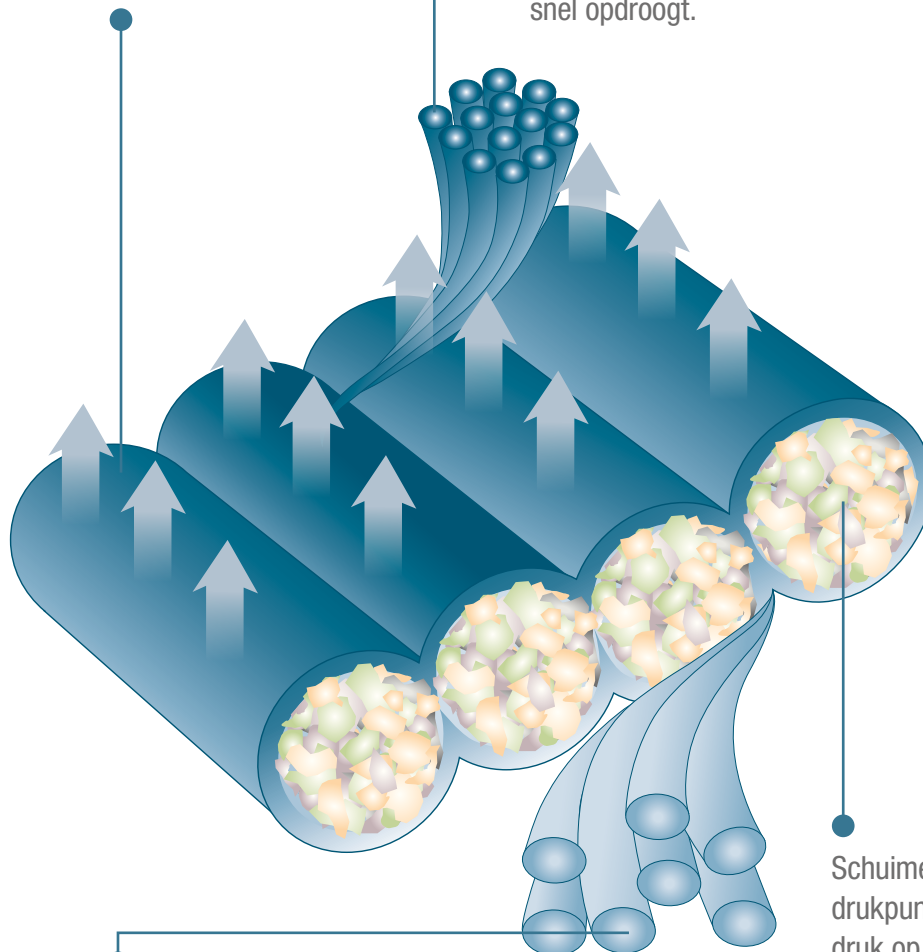

Glad, duurzaam garen, optimaal geschikt om vocht van de huid weg te voeren. Zorgt voor meer draagcomfort.

Schuimelementen voor meerdere drukpunten. Wisselende, langdurige druk op fibrotisch weefsel kan voor betere behandelresultaten zorgen.



2. ASSORTIMENT BOVENLICHHAAM

JOVILINER ARM

CONFECTIE

VOORHEEN JOVIPAK TRANSITIONS

JOBST JoViLiners verminderen oedeem en fibroses. Het zijn verband- en polstermaterialen om te gebruiken in combinatie met compressiesystemen zoals een ICP apparaat. Het onderliggende weefsel wordt intensief gemasseerd door de vulling van versnipperd foam. Dit zorgt voor vermindering van het oedeem, verbetering van de microcirculatie en vooral verzachting van het fibrotische weefsel.

JOBST JoViLiners kunnen ook worden gebruikt in combinatie met zwachtels. In iedere fase van de behandeling, van de reductiefase tot aan de onderhoudsfase. De verbanden worden gemaakt van katoen/ Lycra® in de kleur Ivory.



JOBST JOVILINER ARM AG

De JOBST JoViLiner arm met Continuous Flow-kanalen bedekt de arm vanaf de aanzet van de nagels tot de oksel*. De zogenaamde Stitched-Finger Glove-stijl maakt het gebruik van vingerverband overbodig.

Patiënten met significante of sterk fluctuerende oedemen kunnen er voor kiezen te wisselen tussen de JOBST JoViLiner arm (eventueel met zwachtels) en hun JoViPak arm.

*Met laterale verhoging van 5 centimeter.

MAATTABEL JOBST JOVILINER ARM AG

Maat	Omvang biceps
S	23 - 30,5 cm
M	30,5 - 38 cm
L	38 - 46 cm
XL	46 - 56 cm

Maat	Lengte pols tot oksel
Kort/Normaal	41 - 44,5 cm
Lang/XLang	44,5 - 48 cm

JoViPak confectie orderformulieren:
JoViLiner Arm bestelformulier - JoViLiner Arm receptformulier



ARMVERBAND AG1

Een lange armkous gevuld met versnipperd foam, van DIP (het gewrichtje in de hand tussen het voorlaatste en het eindkootje) tot oksel met een laterale verhoging van 10 cm en een anatomisch geplaatste duim. Continuous Flow™-kanalisering drijft lymfevocht lateraal af van de oksel naar andere functionele banen. **Verkrijgbaar in Polartec® Powerdry® in de kleuren Black en Royal Blue.**



JOBST JOVIJACKET

Een JOBST JoViJacket kan worden toegevoegd om extra compressie te geven. **Verkrijgbaar in Black.**

MAATTABEL JOVIPAK ARMVERBAND

Maat	Smalste omvang pols (C)	Smalste omvang elleboog (C)	Omvang oksel (G)
XS	14 - 15,5 cm	20 - 23 cm	23 - 27,5 cm
XS+	14 - 15,5 cm	22 - 25 cm	27 - 31 cm
S	15,5 - 16,5 cm	23 - 26 cm	27,5 - 32 cm
S+	15,5 - 16,5 cm	25 - 28 cm	31 - 36 cm
M	16,5 - 18 cm	26 - 29 cm	32 - 36 cm
M+	16,5 - 18 cm	28 - 31 cm	36 - 40 cm
L	18 - 19 cm	29 - 33 cm	36 - 41 cm
L+	18 - 19 cm	31 - 35 cm	40 - 44,5 cm
XL	19 - 20,5 cm	33 - 37,5 cm	41 - 45 cm
XL+	19 - 20,5 cm	35 - 39,5 cm	44,5 - 49 cm

Maat	Lengte pols tot oksel
Kort	tot 40,5 cm
Normaal	40,5 - 43 cm
Lang	43 - 45,5 cm

Als uw patiënt niet in een standaard armverband past, kies dan voor een maatwerk armverband.

JoViPak confectie orderformulieren:
JoViPak Arm bestelformulier - JoViPak Arm receptformulier

JOVIPAK BOX GLOVE

CONFECTIE

De ideale handschoen met uitstekende pasvorm. Kan ook gedragen worden in combinatie met een armkous. Door het box-ontwerp (de vier locknaden aan elke vinger) kan de lengte naar wens worden afgeknipt zonder te rafelen en de vingers glijden er eenvoudig in zonder last te ondervinden van de naden. De Box Glove is anatomisch ontworpen met de duim in de natuurlijke en functionele positie. De Box Glove is gemaakt van Techsheen in de kleur Ivory/Buf of Black.



De Box Glove kan enkellaags en dubbellaags (dorsaal of geheel) geleverd worden. De dubbellaags Box Gloves zijn vooral voor gebruik overdag en kunnen gecombineerd worden met JoViPads.

WASSEN: de handschoen moet met de hand worden gewassen en mag niet in de droogtrommel. **LET OP:** was de handschoen vóórdat u de vingers afknipt; deze kan nog krimpen.

LET OP: JOBST PitPaks kunnen moeilijker te verdragen zijn en geadviseerd wordt deze alleen onder toezicht van een therapeut te gebruiken. Controleer de tolerantie van patiënten en bouw desgewenst de draagtijd op. JOBST PitPaks worden doorgaans niet vergoed door de ziektekostenverzekering en komen dus geheel voor eigen rekening. Informeer bij BSN medical voor de prijs van het product.

U schuift foam, JoViPads of JOBST PitPaks eenvoudig tussen de lagen voor extra compressie.



JoViPad foam palm



JoViPad foam dorsaal



PitPak palm



PitPak dorsaal

MAATTABEL JOVIPAK BOX GLOVE

Maat	Omvang palm	Omvang pols	Boven pols
XS	17,5 - 18,5 cm	14,5 - 15,5 cm	15,5 - 16,5 cm
S	18,5 - 19,5 cm	15,5 - 16,5 cm	16,5 - 17,5 cm
M	19,5 - 21 cm	16,5 - 18 cm	17,5 - 19 cm
L	21 - 22,5 cm	18 - 19,5 cm	19 - 20,5 cm
XL	22,5 - 24 cm	19,5 - 21 cm	20,5 - 23 cm

JoViPak confectie orderformulieren:

JoViPak Box Glove bestelformulier - JoViPak Box Glove receptformulier

JOVIPAK HOOFD, NEK, EN KIN

CONFECTIE



KINBAND STANDAARD

Ontworpen voor behandeling van oedeem aan hals, nek, kaak en de voorste/laterale delen van het gezicht (bedekt de oren gedeeltelijk). Door de open zoom aan de onderkant kunt u zelf de vulling kiezen. Het klittenband bij de nek en aan de boven- en achterkant van het hoofd kan worden aangepast naar wens van de patiënt, waardoor de kinband geschikt is om 's nachts te dragen. De foto toont de standaard kinband met universele nekpads. **Te bestellen in S, M, L, XL**



KINBAND UITGEBREID

Ontworpen voor de behandeling van oedeem aan hals, kaak en de laterale delen van het gezicht; bedekt het oor, het laterale deel van het hoofd en achter het oor. Door de open zoom aan de onderkant kunt u zelf de vulling kiezen. Het klittenband bij de nek en aan de boven- en achterkant van het hoofd kan worden aangepast naar wens van de patiënt, waardoor de kinband geschikt is om 's nachts te dragen. De foto toont de uitgebreide kinband met peri auriculaire nekpads. **Te bestellen in S, M, L, XL**



HALF GEZICHTS- EN NEKMASKER

Voor hoofd- en halsoedeem aan één kant van het gezicht. Deze losse, met foam gevulde, aangepaste versie van de kinband bedekt de kin, het oog en het voorhoofd. Het klittenband bij de nek en aan de boven- en achterkant van het hoofd kan worden aangepast naar wens van de patiënt, waardoor het masker ook 's nachts kan worden gedragen. De hals is gestikt met Continuous Flow-kanalisering om optimale lymfedrainage te ondersteunen. Verkrijgbaar in linker en rechte uitvoering. **Te bestellen in S, M, L, XL**



GEZICHTS- EN NEKMASKER (ZONDER VULLING)

Voor het hele gezicht behalve de neus en lippen. Dit masker heeft verstelbaar klittenband aan de boven- en achterkant van het gezicht, de hals en boven de bovenlip. De verstelbare band langs de bovenste helft van het gezicht zorgt voor volledig zicht als dit nodig is. Let op: het kant-en-klare masker heeft geen vulling maar wel een open zoom aan de onderkant voor eventuele vulling. Het masker kan worden gevuld met JoViPads naar keuze. **Te bestellen in S, M, L, XL**



NEK PAD UNIVERSEEL

Ontworpen voor bilateraal hoofd- en halsoedeem met zwelling in de hals voor of achter het oor. Als de zwelling voor het oor zit, bestelt u deze pad met een Standaard kinband. Als de zwelling achter het oor zit, bestelt u de pad met een Uitgebreide kinband. **Te bestellen in één maat, small/medium**



NEK PAD PERI AURICULAIR

Ontworpen voor bilateraal hoofd- en halsoedeem met zwelling in de hals en voor of achter het oor. Als de zwelling voor het oor zit, bestelt u deze pad met een Standaard kinband. Deze pad besteld u met een Uitgebreide kinband. **Te bestellen in één maat, small/medium**



OOG PAD

De JoViPads oog is ontworpen om bilaterale druk te geven op het orbitale gebied van het gezicht. De losse vulling en laterale kanalisering zorgen voor afvoer naar de pre-auriculaire lymfklieren. **Te bestellen in Buff Polartec® Powerdry®.**
Hoofdomtrek (1 cm boven de wenkbrauw): small/medium (53 - 58,5 cm), large/xlarge (58,5 - 66 cm)

Kinbanden, maskers en pads zijn verkrijgbaar in katoen/Lycra® in Ivory (behalve de oogpads). Verstelbaar, veelzijdig en zeer comfortabel.

MAATTABEL KINBAND, GEZICHTS- EN NEKMASKER

Maat	Omvang hoofd	Omvang nek
S	53 - 56 cm	28 - 33 cm
M	56 - 58,5 cm	33 - 38 cm
L	58,5 - 61 cm	38 - 43 cm
XL	61 - 63,5 cm	43 - 48,5 cm

MAATTABEL OOGPAD

Maat	Omvang hoofd
S/M	53 - 58,5 cm
L/XL	58,5 - 66 cm

Hoofd omvang 1,5 cm boven wenkbrauw
 Nek omvang breedste deel

JoViPak confectie orderformulieren:

JoViPak Hoofd, Nek en Kin bestelformulier - JoViPak Hoofd, Nek en Kin receptformulier

JOVIPADS BORST EN BORSTWAND

CONFECTIE

JOBST JoViPads borst en borstwand verzachten fibrose na een mastectomie of lumpectomie.

POST-LUMPECTOMY JOVIPADS



Voor oedeem en stralingsfibrose van de aangedane borst en/of de borstwand. De PL Pad bedekt de aangedane borst helemaal en zorgt voor laterale afvoer naar de liesknopen en posterior via de ruggengraat. Past onder de meeste sport- en/of compressiebeha's. **Cupmaat: small (cup B/C) lengte 46 cm, medium (cup D) lengte 50 cm, large (cup E/F) lengte 55 cm en xlarge (cup G) lengte 66 cm**

UNILATERAL POST-MASTECTOMY JOVIPADS



Voor borstwandoedeem en/of stralingsfibrose na een mastectomie*. Kan gebruikt worden onder een mastectomie beha. **Beha-maat: small (70 - 75 cm), medium (80 - 85 cm), large (90 - 95 cm) en xlarge (100 - 110 cm)**

* De PM pad bedekt de aangedane borstwand helemaal en zorgt voor de laterale afvoer naar de liesknopen en posterior via de ruggengraat.

SERRATUS ANTERIOR JOVIPADS



Om lymfevocht lateraal naar de liesklieren en posterior richting ruggengraat af te voeren. Past in de meeste mastectomie- of standaard beha's. **Beha-maat: small (70 - 75 cm), medium (80 - 85 cm), large (90 - 95 cm) en xlarge (100 - 110 cm)**

MINI AXILLA JOVIPADS



Een losjes gevulde pad die compressie in de oksel biedt, met een Continuous Flow™-verlengstuk, welke op de plaats kan worden gehouden door een sport- of compressiebeha. **Beha-maat: small (70 - 75 cm), medium (80 - 85 cm), large (90 - 95 cm) en xlarge (100 - 110 cm)**

INFRAMAMMARY JOVIPADS



Fibrose van de borst en/of rondom de borst is voor veel vrouwen een blijvend probleem. Deze ellipsvormige pad loopt van de serratus anterior tot de processus xiphoideus. Geeft zachte compressie aan de onderzijde van de borst. De pad kan onder een sport- of compressiebeha gebruikt worden. **Beha-maat: small (70 - 75 cm), medium (80 - 85 cm), large (90 - 95 cm) en xlarge (100 - 110 cm)**

Al deze pads worden gemaakt van Polartec® Powerdry® in de kleur Buff.

JoViPak confectie orderformulieren:

JoViPads Borst en Borstwand bestelformulier - JoViPads Borst en Borstwand receptformulier

JOVIPADS FOAM

CONFECTIE

Deze, met schuim gevulde, pads zijn verkrijgbaar in katoen/Lycra® in de kleur Ivory.

TYPE: POP



Slimline 20 x 12,5 cm ovaalvormige pad voor bescherming van de kwetsbare knieholte. De pad kan natuurlijk in elk ander klein gebied gebruikt worden waar oedeem en/of fibrose een probleem is. De pad wordt gebruikt onder zwachtels, IPC-manchetten of compressiekleding. **Verkrijgbaar in één maat.**

TYPE: KDNY



Slimline Kidney Pads zijn verkrijgbaar in twee maten: 12,5 x 25,5 cm of 7,5 x 18 cm. Er zijn verschillende manieren van toepassen, bijvoorbeeld de laterale borstwand onder de oksel, onder de knieschijf of de binnenzijde dijbeen bij de lies. Deze pads worden gebruikt om fibrose tegen te gaan en zijn het meest effectief onder compressiezwachtels of -kleding.

JoViPak confectie orderformulieren:

PitPaks en JoViPads bestelformulier - PitPaks en JoViPads receptformulier

JOBST PitPaks zijn speciaal ontwikkeld voor de behandeling van hardnekkige, langdurige fibrose of lipodermatosclerose. Pitpaks worden gemaakt van katoen/ Lycra® en zijn gevuld met 100% natuurlijk materiaal. PitPaks zijn verkrijgbaar in verschillende vormen en geschikt voor alle verschillende lichaamsdelen.

De productlijn bevat PitPaks met kanalisering voor grotere gebieden, los gevulde pakkingen voor kleinere gebieden en half of deels gevulde pakkingen voor specifieke toepassingen. Sommige grotere los gevulde pakkingen zijn zo gestikt dat het natuurlijk materiaal niet naar een kant kan schuiven.

JOBST PitPaks zijn harder dan foampads en daarom wordt geadviseerd deze pads alleen onder toezicht van een therapeut te gebruiken. Controleer de tolerantie van de patiënt, bepaal de hoeveelheid gewenste compressie en bouw de draagtijd op.

Alleen verkrijgbaar in katoen/Lycra® in de kleur Ivory.

JOBST PITPAKS CILINDER

JOBST PitPaks onder korte-rek zwachtels vergemakkelijkt het zachter maken van fibrotisch weefsel op verschillende delen van het lichaam.



Type: SR-CYL-FP D6

Voor de onderarm. Volledige vulling, lengte 15 cm, omvang 18 - 23 cm



Type: SR-CYL-FP D6.5

Voor de bovenarm. Volledige vulling, lengte 16,5 cm, omvang 23 - 30,5 cm



Type: SR-CYL-HP D7.5

Voor de onderarm. Halve vulling, lengte 19 cm, omvang 18 - 25,5 cm



Type: SR-CYL-FP D8

Voor het onderbeen. Volledige vulling, lengte 20,5 cm, omvang 28 - 38 cm



Type: SR-CYL-HP D8.5

Voor het onderbeen. Halve vulling, lengte 21,5 cm, omvang 20,5 - 30,5 cm



Type: SR-CYL-FP D9

Voor het bovenbeen. Volledige vulling, lengte 23 cm, omvang 35,5 - 43 cm

JOBST PITPAKS BASISVORMEN

Geschikt voor de behandeling van fibrose op verschillende plaatsen op het lichaam.



Type: RND 6
Rond JoViPad,
diameter 15 cm



Type: SR- EC-FP 6x9
Rechthoekige PitPak,
afmeting is 15 x 23 cm

JOBST PITPAKS OVERIGE VORMEN



Type: IMP

Inframammary PitPak.

Halvemaan-vormige PitPaks volgen de natuurlijke contouren van het lichaam. Voor hardnekkige fibrose in gebieden als de aanzet van de tenen, laterale borstwand en het onderste deel van de borst.

Small = 21,5 x 9 cm, medium = 25,5 x 10 cm en large = 28 x 12,5 cm



Type: DRSM 4x5

Dorsum PitPak. Te gebruiken onder korte-rek zwachtels of JOBST FarrowWrap handverband voor het verzachten van langdurige fibrosering van de handrug.

JoViPak confectie orderformulieren:

PitPaks en JoViPads bestelformulier - PitPaks en JoViPads receptformulier

LET OP! JOBST PitPaks vallen niet onder het basispakket en worden door de zorgverzekeraar niet vergoed. Ze komen dus geheel voor eigen rekening. Informeer bij BSN medical voor de prijs van het product.

JOVIPAK ARM

MAATWERK


JoViPak armverbanden zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren in de onderstaande maatwerk uitvoeringen.

Keuze stoffen:

- Polartec® Powerdry®
- Polartec® Silkweight
- Katoen/Lycra®

Extra mogelijkheden:

- Slimline
- Snug Fit
- 2 Blend Foam
- Ritsen (hand, onder en/of bovenarm)

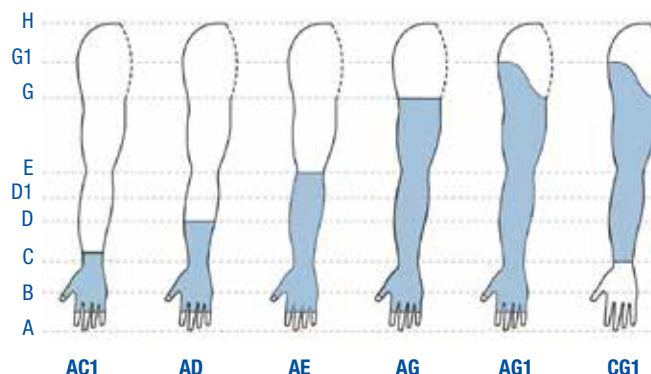

ARMVERBAND AG1

AG1 armverbanden kunnen ook worden besteld met een losse hand (AC1 en CG1). Een licht gewatteerde manchet wordt toegevoegd aan de handschoen om de twee stukken goed te laten aansluiten.



JOBST JOVIJACKET

Een JOBST JoViJacket kan worden toegevoegd om meer compressie te geven.
Verkrijgbaar in Black en White.



HANDSCHOEN MET GESTIKTE VINGERS MET OF ZONDER RITS

Elk JoViPak armverband kan worden geleverd met stiksels tussen de vingers. De standaard vingerlengte loopt tot de DIP, maar de gewenste lengte kan worden aangegeven d.m.v. een stippellijn op het handomtrek formulier. De optie handschoen met gestikte vingers kan in de plaats komen van vingerzwachtels voor patiënten met gezwollen vingers en/of hand. De inzet van een 'losse' palmpad of rugpad kan ook functioneel zijn bij het beheersen van handzwellingen.

JoViPak maatwerk orderformulieren:

JoViPak Arm bestelformulier - JoViPak Arm receptformulier - JoViPak Arm maatschema - JoViPak Arm Hand links / rechts

JOVIPAK SCHOUDER - THORAX

MAATWERK

De Schouder-Thorax is geschikt voor patiënten die of een mastectomie of een lumpectomie hebben ondergaan en naast armoedeem ook oedeem rondom de schouder en/of bovenlichaam hebben.

De Schouder-Thorax wordt gemaakt met behulp van Computer Aided Design (CAD)-technologie. Ieder product wordt gemaakt met behulp van een patroon op de exacte afmetingen van de patiënt.



SCHOUDER - THORAX

Dit product raden we aan te bestellen in Silkweight Powerdry®-stof met een Slimline-ontwerp. Het verband op de foto hiernaast heeft drie ritsen om het eenvoudiger aan te kunnen trekken: een middenvoor-thoracale rits, een onderarmrits, van pols naar elleboog en een rits over de rug van het aparte handstuk. Verkrijgbaar in meerdere kleuren.



SCHOUDER - THORAX JOBST JOVIJACKET

JOBST JoViJacket geeft extra druk. Dit wordt aanbevolen voor een maximale pasvorm en effectiviteit.



SCHOUDER - THORAX MET/ ZONDER THORAX VULLING

U heeft de keuze om de romp al of niet te voorzien van foamvulling, of deze niet te laten vullen.

JoViPak maatwerk orderformulieren:

JoViPak Schouder-Thorax bestelformulier - JoViPak Schouder-Thorax receptformulier -
JoViPak Schouder-Thorax maatschema - JoViPak Schouder-Thorax Hand links / rechts

JOVIPAK VEST

MAATWERK



Het JoViPak Vest is een veelzijdig verband voor borstwandoeedeem en fibrose na een lumpectomie of mastectomie. Het Vest heeft verstelbare schouderbanden en is gemaakt van katoen/Lycra®, wat zorgt voor meer comfort en het toelaten van uitzetting van de borstkas tijdens inademen. De middensluiting is van klittenband in 2 delen (gesplitst bij de taille). Voor optimaal therapeutisch effect wordt aangeraden een JOBST JoViJacket over het Vest te dragen. Voor patiënten in een warm klimaat kunnen vesten worden besteld in Slimline uitvoering. Het Vest kan doorlopen tot de rand van het bekken als de patiënt een natuurlijke taille heeft (kleinere omtrek bij de taille dan bij de heup). Als de patiënt geen natuurlijke taille heeft, dan wordt een Vest tot de onderste rib aangeraden. Optioneel is een bodystocking afwerking, met sluiting aan de voorzijde van het Vest.

CONTINUOUS FLOW-KANALEN

Continuous flow-kanalen voeren vocht over het bovenlichaam af naar de andere zijde of de niet aangedane oksel. Deze optie is van toepassing bij patiënten die een mastectomie of een lumpectomie hebben ondergaan.

Kanaal opties



BILATERAAL (DUBBELE VULLING)

Voor patiënten met een dubbele mastectomie of lumpectomie met weinig tot geen functionele lymfeklieren in beide oksels. Continuous flow-kanalen voeren vocht distaal af naar het verzamelgebied in de lies.

Vulling opties



½ VULLING UNILATERAAL (HORIZONTALAAL OF VERTICAAL)

Voor patiënten die een unilaterale mastectomie of lumpectomie hebben ondergaan en borstwandfibrose aan één kant hebben. De foamvulling met Continuous flowkanalen strekt zich tot over de verticale achter- en voorwaterscheidingen. U bestelt deze rechts- of linkszijdig.



PAD P-PI (PADDED INSERT) VOOR VEST (OPTIONEEL)

Om de druk op het gebied van de ontbrekende borst te egaliseren. Verkrijgbaar in de cupmaten B/C, D, E/F en G.

LET OP: Voor Lumpectomie patiënten met alleen gelokaliseerde oedemen in de borst, rib of bovenrug is de JoViBusti (pagina 26) mogelijk een beter alternatief. Als u overweegt een armverband bij het Vest te dragen, is het Schouder-Thorax verband met bovenlijfverlenging een betere optie.

JoViPak maatwerk orderformulieren:

JoViPak Vest bestelformulier - JoViPak Vest receptformulier - JoViPak Vest maatschema

JOVIPAK BUSTI

MAATWERK



De JoViBusti is ideaal voor patiënten waarbij een lumpectomie is uitgevoerd en oedeem of fibrose in de borst, borstwand en/of bovenrug hebben. Na een mastectomie wordt het JoViPak Vest aangeraden (pagina 25). De JoViBusti heeft geen schouderbandjes en loopt door tot de onderste rib (in plaats van tot aan de taille.)

De JoViBusti heeft een ritssluiting aan de voorkant en verticale kanalen. De JoViBusti is uitgevoerd in Slimline waardoor deze overdag kan worden gedragen.

Verkrijgbaar in Polartec Powerdry in meerdere kleuren.

Een JOBST JoViJacket™ dient te worden besteld om de effectiviteit van de JoViBusti te optimaliseren en op zijn plaats te houden.

JoViPak maatwerk orderformulieren:
JoViPak Busti bestelformulier - JoViPak Busti receptformulier

Het maatschema is in het bestelformulier verwerkt.



3. ASSORTIMENT ONDERLICHAAM

JOVILINER BEEN

CONFECTIE

VOORHEEN JOVIPAK TRANSITIONS

JOBST JoViLiners verminderen oedeem en fibroses. Het zijn verband- polstermaterialen om te gebruiken in combinatie met compressiesystemen zoals een ICP apparaat. Het onderliggende weefsel wordt intensief gemasseerd door de vulling van versnipperd foam. Dit zorgt voor vermindering van het oedeem, verbetering van de microcirculatie en vooral verzachting van het fibrotische weefsel.

JOBST JoViLiners kunnen ook worden gebruikt in combinatie met zwachtels. In iedere fase van de behandeling, van de reductiefase tot aan de onderhoudsfase. De verbanden worden gemaakt van katoen/ Lycra® in de kleur Ivory.



JOBST JOVILINER AD

De JOBST JoViLiner AD (onderbeen) met Continuous Flow-kanalen bedekt het been vanaf het uiteinde van de tenen tot aan de knie en scheidt de tenen tot aan de nagels met stiksels, m.u.v. de derde en vierde teen. Dit zit comfortabel en afzonderlijke teenzwachtels zijn in de meeste gevallen niet meer nodig.



JOBST JOVILINER DG1

De JOBST JoViLiner DG1 (bovenbeen) heeft Continuous Flow-kanalen vanaf net onder de knie tot aan de lies en heeft een laterale verhoging van 10 cm.

MAATTABEL JOVILINER AD

Maat	Omvang kuit	Maat	Lengte vloer tot knie in cm
S	33 - 38 cm	Kort	tot 36,5 cm
M	38 - 46 cm	Normaal	36,5 - 40 cm
L	46 - 58 cm	Lang	40 - 44,5 cm
XL	58 - 66 cm	XLang	44,5 - 48,5 cm

MAATTABEL JOVILINER DG1

Maat	Omvang bovendij	Maat	Knie tot lies in cm
S	48 - 58 cm	Kort	tot 32,5 cm
M	58 - 74 cm	Normaal	32,5 - 36 cm
L	74 - 89 cm	Lang	36 - 39,5 cm
XL	89 - 102 cm	XLang	39,5 - 43 cm

JoViPak confectie orderformulieren:
JoViLiner Been bestelformulier - JOBST JoViLiner Been receptformulier

JOVIPAK BEEN

CONFECTIE



BEENVERBAND AD

Geschikt voor lymfoedeem of CVI aan het onderbeen, ook bij zwelling van de voet en/of tenen. De zool van de voet loopt tot het puntje van de langste teen maar de bovenkant is in een hoek afgesneden om de tenen bloot te laten. De voetlengte is in verhouding met de lengte en omtrek van het been. Het verband kan ook worden gebruikt in combinatie met de Hip Hugger™. Verkrijgbaar in Polartec® Powerdry® in de kleuren Black en Royal Blue.



JOBST JOVIJACKET

JOBST JoViJackets buitenkousen kunnen korte-rek zwachtels vervangen. Ze zijn van nylon/Spandex® met een antislipzolen. Verkrijgbaar in de kleur Black.



SAFETY SOK

De bijpassende Polartec® Powerdry® overkous loopt van de teenaanzet tot halverwege de kuit met een antislipzool tegen uitglijden en slijtage. De sok wordt standaard bij elke confectie AD bestelling geleverd.

MAATTABEL JOVIPAK BEENVERBAND

Maat	Smalste omvang enkel (B)	Breedste omvang kuit (C)	Omvang 2cm onder knie (D)
XS	19 - 20,5 cm	33 - 35,5 cm	29 - 32 cm
XS+	24 - 25,5 cm	35,5 - 38 cm	30,5 - 33 cm
S	20,5 - 22 cm	35,5 - 38 cm	32 - 34,5 cm
S+	25,5 - 27 cm	38 - 40,5 cm	33 - 35,5 cm
M	22 - 23 cm	38 - 40,5 cm	34,5 - 37 cm
M+	27 - 28 cm	40,5 - 43 cm	35,5 - 38 cm
L	23 - 24 cm	40,5 - 43 cm	37 - 39,5 cm
L+	28 - 29 cm	43 - 45,5 cm	38 - 41 cm
XL	24 - 25,5 cm	43 - 45,5 cm	39,5 - 42 cm
XL+	29 - 30,5 cm	45,5 - 48 cm	41 - 43 cm
XXL	25,5 - 27 cm	45,5 - 48 cm	42 - 44,5 cm
XXL+	30,5 - 32 cm	48 - 51 cm	43 - 46 cm

Maat	Lengte grond tot knie
Kort	tot 38 cm
Normaal	38 - 42 cm
Lang	42 - 46 cm

Als uw patiënt niet in een standaard beenverband past, kies dan voor een maatwerk beenverband.

JoViPak confectie orderformulieren:

JoViPak Been bestelformulier - JoViPak Been receptformulier

JOVIPAK PADS GENITAAL

CONFECTIE

VOOR MANNEN EN VROUWEN

JoViPak Pads zijn gemaakt van Polartec® Powerdry® materiaal in de kleur Buff.



JOVIPAK PADS GENITAAL VOOR VROUWEN

Geschikt voor labia oedeem en/of fibrose. De breedte aan de voorzijde is ontworpen om het litteken van een hysterectomie in de bikinilijn geheel te bedekken. De met versnipperd foam gevulde pad met verticaal Continuous Flow-stikpatroon voert lymfevocht weg van de pubis richting de verzamelgebieden in de oksel. De genitaal pad kan worden gebruikt onder een compressiekledingstuk voor bescherming, meer comfort en optimale resultaten. De banden zijn gemaakt van zacht, elastisch materiaal en lopen over de rand van het bekken om de pad op zijn plek te houden (banden kunnen desgewenst worden afgeknipt). **Verkrijgbaar in 4 maten: small, medium, large en xlarge**



JOVIPAK PADS GENITAAL VOOR MANNEN

Geschikt voor scrotumoedeem en/of fibrose. De met versnipperde foam gevulde pad met verticaal Continuous Flow-stikpatroon voert lymfevocht weg van het testesgebied naar een alternatieve, functionele lymfatische weg. De pad kan worden gebruikt onder een compressiekledingstuk voor bescherming, meer comfort en optimale resultaten. De banden zijn gemaakt van zacht, elastisch materiaal en lopen over de rand van het bekken om de pad op zijn plek te houden (banden kunnen desgewenst worden afgeknipt). **Verkrijgbaar in 4 maten: small, medium, large en xlarge**

MAATTABEL JOVIPAK PADS GENITAAL VOOR VROUWEN

Broek maat	
Small (34-38)	Medium (40-42)
Large (44-46)	XLarge (48-52)

MAATTABEL JOVIPAK PADS GENITAAL VOOR MANNEN

Omtrek Scrotum	
Small (28 cm)	Medium (36 cm)
Large (42 cm)	XLarge (52 cm)

JoViPak confectie orderformulieren:

JoViPak Pads Genitaal bestelformulier - JoViPak Pads Genitaal receptformulier

JOVIPAK BEEN

MAATWERK


Maatwerk beenverbanden zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren in de onderstaande uitvoeringen.

Keuze stoffen:

- Polartec® Powerdry®
- Katoen/Lycra®

Extra mogelijkheden:

- 2 Blend foam
- Tenen bedekken

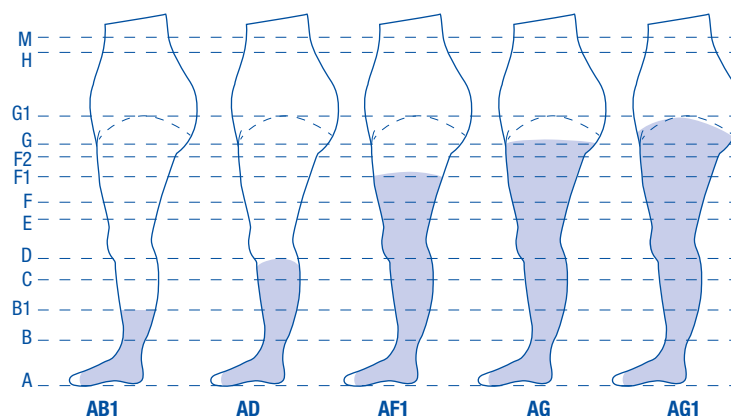

BEENVERBAND AG1

Afhankelijk van het type lymfoedeem voeren de kanalen het vocht af van de liesknopen naar de zijkant van de heup (secundair lymfoedeem) of naar het verzamelgebied in de lies (primair lymfoedeem).

Desgewenst kan voor het aantrekgemak gekozen worden voor 1 of 2 ritsen. Als de wreefomvang (H/A) 10 cm groter is dan omvang enkel (cB) wordt een rits op het onderbeen geadviseerd.



SAFETY SOK

De bijpassende Polartec® Powerdry® overkous loopt van de teenaanzet tot halverwege de kuit met een antislipzool tegen uitglijden en slijtage. De safety sok is verkrijgbaar voor AB1 tot AG1 beenstukken.

JoViPak maatwerk orderformulieren:

JoViPak Been bestelformulier - JoViPak Been receptformulier - JoViPak Been maatschema - JoViPak Been Voet links / rechts

JOVIPAK HIP HUGGER

MAATWERK



Voor patiënten die hoog tot in de heup oedeem hebben, of zware dijbeenkwabben. De Hip Hugger loopt van net onder de knie tot de taille en wordt op zijn plaats gehouden door de nylon/Spandex® band heupband met klittenband.

Indien de lies open moet blijven en er geen genitale zwelling is, kunnen twee Hip Huggers samen gedragen worden. als alternatief voor een Boxer Short. U kunt dit aangeven op het bestelformulier.

Hip Huggers worden meestal gedragen in combinatie met onderbeenverbanden van JoViPak en volledige JOBST JoViJackets van nylon/Spandex®. De onge vulde manchet onderaan de Hip Hugger past in het onderbeenverband.

De Hip Hugger is uitstekend te combineren met andere vormen van compressie, bijvoorbeeld zwachtelen. Soms kan een volledige JOBST JoViJacket de zwachtels helemaal vervangen.

Alleen verkrijgbaar in katoen/Lycra® in de kleuren Black, Royal Blue of Ivory.

JoViPak maatwerk orderformulieren:

JoViPak Hip Hugger bestelformulier - JoViPak Hip Hugger receptformulier - JoViPak Hip Hugger maatschema

JOVIPAK BOXER SHORT

MAATWERK



JOVIPAK BOXER SHORT

De Boxer Short loopt tot hoog in de taille, heeft een ritssluiting aan de voorkant en Continuous Flow-kanalisering, waardoor overtollig vocht van de liezen wordt afgevoerd naar het transversale waterscheidingspunt. De Boxer Short is verkrijgbaar voor mannelijke en vrouwelijke patiënten met heup-, gluteaal of genitaal oedeem, in meerdere kleuren.

De pijplengte van de Boxer Short is maximaal 15,5 cm vanuit de lies gemeten. Als de Boxer Short wordt gedragen in combinatie met een beenverband, wilt u duidelijk aangeven op het formulier aan waar het beenverband en de Boxer Short bij elkaar komen.

TIP: Er kan een JOBST JoViJacket van volledige lengte van nylon/Spandex® worden besteld om de twee verbanden tot een eenheid te combineren.

De Boxer Short, in combinatie met een JOBST JoViJacket, kan bij een obese patiënt met een licht overhangende buik een oplossing zijn. De short tilt het weefsel op en verlicht de druk op de liesknopen. Meet dikke patiënten terwijl ze op de rug liggen en stuur digitale foto's mee met de bestelling.



JOBST JOVIJACKET

Gebruik het JOBST JoViJacket van nylon/Spandex® over de Boxer Short voor de meest optimale en effectieve compressie.


BEENVERBAND AF1 MET BOXER SHORT EN JOBST JOVIJACKET AG



Deze combinatie van drie producten loopt van de tenen tot in de taille.


Primair Lymfoedeem

Als de lies lymfknopen functioneren, kunt u ervoor kiezen het vocht naar het verzamelgebied in de lies te voeren. In dit geval is de doorstroom van de Continuous-Flow-kanalisering volgens de normale kanalen geschikt, zoals weergegeven in de tekening links.

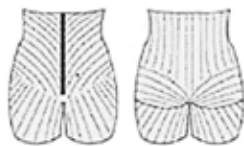

Secundair Lymfoedeem

Als de lies lymfknopen operatief verwijderd, bestraald, of niet-functioneel zijn, kan het vocht omgeleid worden. Weg van het verzamelgebied in de lies en omhoog naar de gelijkzijdige oksel, zoals weergegeven in de tekening links. De keuze voor kanalisering wordt door de arts of therapeut bepaald.

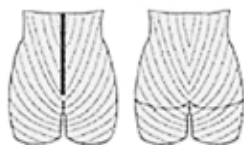

JoViPak maatwerk orderformulieren:

JoViPak Boxer Short bestelformulier - JoViPak Boxer Short receptformulier - JoViPak Boxer Short maatschema



4. PATIËNTINFORMATIE

AAN- EN UITTREKINSTRUCTIES

JOBST® JOVIPAK ARMVERBAND

Aantrekgemak

Afhankelijk van leeftijd en fysieke kracht én van het bedoelde gebruik (bijv. onder zwachtels, onder IPC-manchetten of compressiekleding voor 's nachts) varieert het aantrekgemak.

De onderstaande instructies zijn voor uw patiënt van belang, omdat aantrekgemak essentieel is voor de therapietrouw en zelfredzaamheid. Nauwkeurig opgevolgde instructies verlengen de levensduur van het JoViPak verband.

Een armverband aantrekken

TIP: Het aantrekken wordt een stuk makkelijker als uw patiënt gebruik maakt van een **anti-slipmat**, zoals de **Dycem***. De anti-slipmat geeft een veilige ondergrond, stabiliteit en een betere grip.

Trek of schuif het armverband zonder om te slaan aan uw arm. Het dragen van een rubberen handschoen met noppen profiel aan uw goede hand kan ook helpen bij het aantrekken. Door het gebruik van een rubberen handschoen wordt het risico dat vingernagels de stof beschadigen beperkt. Het JoViPak verband en de JoViJacket gaan zo langer mee.


UITLEG

STAP 1



Ga voor een tafel staan (of het liefst voor een keukenblad zodat u niet voorover hoeft te buigen) en leg de anti-slipmat op het blad voor u. Schuif uw hand met de palm naar beneden zo ver mogelijk in de mouw en duw uw hand en het JoViPak verband tegen de anti-slipmat.

STAP 2

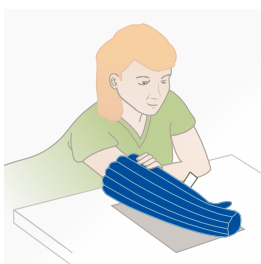


U kunt uw vingers verder in het verband bewegen terwijl de anti-slipmat het JoViPak verband op zijn plaats houdt. Om het verband hoger om de arm te krijgen, legt u uw bovenarm op de anti-slipmat en duwt u stevig door tot het verband aansluit in de oksel.

JOBST JoViJackets

Het JOBST JoViJacket wordt **OVER** het JoViPak armverband gedragen.

OPMERKING: Waslabels zitten aan de **buitenkant** van de JoViPak verbanden en aan de **binnenkant** van een JOBST JoViJacket.

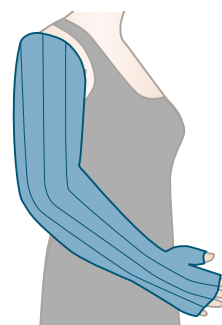

*De Dycem wordt apart verkocht en dient door de patient zelf betaald te worden.

JOBST® JOVIPAK BEENVERBAND

Aantrekgemak

Afhankelijk van leeftijd en fysieke kracht en van het bedoelde gebruik (bijv. onder zwachtels, onder IPC-manchetten of compressiekleding voor 's nachts) varieert het aantrekgemak.

De onderstaande instructies zijn voor uw patiënt van belang, omdat aantrekgemak essentieel is voor de therapietrouw en zelfredzaamheid. Nauwkeurig opgevolgde instructies verlengen de levensduur van het JoViPak verband.

Een beenverband aantrekken

TIP: Het aantrekken wordt een stuk makkelijker als uw patiënt gebruik maakt van een **anti-slipmat**, zoals de **Dycem***. De anti-slipmat geeft een veilige ondergrond, stabiliteit en een betere grip.

Trek het beenverband aan als een laars. Bij een lang JoViPak beenverband slaat u de bovenzijde terug en trekt u rustig aan het dubbelgeslagen verband tot de JoViPak goed om het been zit. Het gebruik van een rubberen handschoen met noppen profiel kan ook helpen bij het aantrekken. Tevens wordt het risico dat vingernagels de stof beschadigen beperkt, waardoor JoViPak uw beenverband en de JOBST JoViJacket langer mee gaan.

UITLEG

STAP 1



Ga op een rechte stoel met rugleuning zitten en leg de anti-slipmat voor u op de vloer. **Rol de bovenkant van het JoViPak verband op.** U heeft zo een betere grip op het verband en het is beter voor de stof. Schuif uw voet zo ver mogelijk in het verband en duw uw voet stevig tegen de anti-slipmat.

STAP 2



U kunt uw tenen verder in het verband bewegen terwijl de anti-slipmat het JoViPak verband op zijn plaats houdt. Om het verband hoger om uw been te krijgen, kunt u de anti-slipmat op de rand van de stoel leggen.

STAP 3




Ga zitten en zorg er voor dat de achterkant van uw dij contact maakt met de anti-slipmat. Duw nu naar beneden alsof u probeert uit de stoel te glijden.

JOBST JoViJackets

Het JOBST JoViJacket wordt **OVER** het JoViPak beenverband gedragen.

OPMERKING: Waslabels zitten aan de **buitenkant** van de JoViPak verbanden en aan de **binnenkant** van JOBST JoViJacket en Safety Sock.

*De Dycem wordt apart verkocht en dient door de patient zelf betaald te worden.

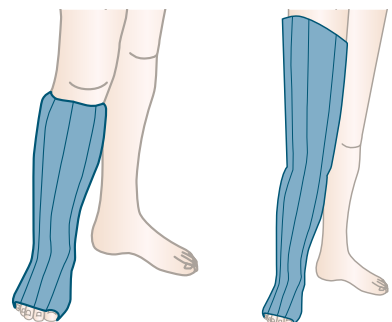

INSTRUCTIE VOOR DE JOVIPAK BOX GLOVE

De Box Glove is ontworpen om de hand te ondersteunen in een functionele positie terwijl adequate compressie wordt gegeven aan hand en vingers. Houd er rekening mee dat de vingers van de handschoen opzettelijk langer dan nodig worden gemaakt, zodat ze op de gewenste lengte kunnen worden geknipt.

Het einde van de vingers en de pols van de handschoen zijn niet afgewerkt, omdat stiksels eventueel insnoering kunnen geven.



BELANGRIJK: voor het inkorten van de vingers lees de instructie!

- De Box Glove krimpt altijd bij de eerste wasbeurt. Daarom is het belangrijk, alvorens de vingers in te korten, om de handschoen eerst te wassen.
- Trek de handschoen goed aan. Wees er zeker van dat de stof van de vingers comfortabel is verdeeld.
- Markeer (met de handschoen aan) waar de vingers moeten eindigen. Dit kunt u doen met potlood of een uitwasbare stift.

Wij adviseren om de vingers van de Box Glove af te knippen bij de basis van het nagelbed.

LET OP: knippen en afwerken

Als de vingers geknipt zijn, zullen kleine draadjes zichtbaar zijn op elke kniplijn en bij elke naad. Een scherpe, korte ruk aan de draad zal de naad vergrendelen.

WASINSTRUCTIES: niet in de wasmachine, niet in de droger

- De Box Glove moet op de hand worden gewassen en aan de lucht gedroogd. Gebruik een mild wasmiddel.

INSTRUCTIE VOOR DE JOVIPAK KINBAND

Ontworpen voor lymfoedeembehandeling aan hals, nek, kaak en de voorste/laterale delen van het gezicht. Met het klittenband bij de nek en aan de boven- en achterkant van het hoofd kunt u de kinband passend maken. De foto toont de standaard kinband. Door de open zoom aan de onderkant kunt u de kinband opvullen met een JoViPak nek pad universeel of peri auriculair (zie pagina 17-18).



WAS- EN DROOGINSTRUCTIES

Alle JOBST JoViPak producten zijn wasbaar

We adviseren de producten regelmatig te wassen. Behandel de JoViPak producten zoals elk delicaat, wasbaar kledingstuk. Gebruik een mild, vloeibaar wasmiddel. Geen bleekmiddel gebruiken.

Wij adviseren JoViPak verbanden te wassen in de wasmachine. De spoelcyclus is goed voor het verwijderen van zeepresten en de centrifugeercyclus voor het verwijderen van water uit het schuim. Stel de wasmachine in op fijn-/wolwas en een matig warme temperatuur (30-40°).

Donkere kleuren kunnen afgeven, vooral Zwart of Royal Blue katoen/Lycra.

JoViPak Box Glove, Hoofd, Nek en Kin

Wij adviseren bij deze producten gebruik te maken van een waszakje. Let op dat het klittenband wordt vastgemaakt vóór het wassen.

JOBST JoViPak verbanden kunnen in de droger. Wij adviseren de droger op een lage temperatuur in te stellen om de levensduur van uw JOBST JoViPak verband te verlengen. Keer producten met katoen/Lycra halverwege de droogtijd binnenstebuiten.

JOBST JoViJacket™

Was de JOBST JoViJacket op de hand. Zwart kan de eerste wasbeurten afgeven. Laat drogen aan de lucht.

JOBST PitPak

Deze producten zijn wasmachinebestendig, maar mogen niet gecentrifugeerd worden. Was met koud water en druk het vocht er al rollend in een handdoek uit. Laat drogen aan de lucht.

Aantrekhelp Dycem

Neem de Dycem zo nodig af met een vochtige doek en gebruik eventueel een milde zeep.

MANAGE UW LYMFOEDEEM ZELF MET JOBST® PRODUCTEN

- ELVAREX
- FARROWWRAP
- JOVIPAK

Met meer dan zestig jaar ervaring in compressietherapie en een patiëntgerichte denkwijze zijn JOBST producten de gouden standaard bij het onder controle houden van lymfoedeem. Naast Elvarex therapeutische elastische kousen en FarrowWrap verbanden bevat het JOBST assortiment nu ook JoViPak. Hiermee biedt BSN medical de producten om uw lymfoedeem nog beter en zelfstandig te managen.

THERAPIES. HAND IN HAND.

www.bsnmedical.nl



5. AANMEETINSTRUCTIES

HET OPMETEN VAN DE ARM

STAPSGEWIJZE INSTRUCTIE VAN HET MEETPROCES

STAP 1



Laat de patiënt met de aangedane arm in een **ontspannen houding** naar u toe zitten (zie foto 1) waarbij de onderarm op een tafel rust met de elleboog een beetje gebogen (35 graden) en de handpalm naar boven.

STAP 2



'C'-omvang

Vraag de patiënt de pols te buigen (in een hoek van 45 graden). De **'C'-markering** (zie foto 2), of de 'smalste pols'-meting in de maattabel is de distale buiglijn. Gebruik een markeerstift of oogpotlood (dat eenvoudig kan worden verwijderd) om de lijn met een stip te markeren.

Meet nu de omvang. Het meetlint moet goed op de huid liggen, maar er niet in drukken of een afdruk achterlaten.

STAP 3




'D'-omvang

De **'D'-markering** (zie foto 3) bevindt zich iets onder het midden van de onderarm, het punt waar de onderarm dikker wordt. De D1-markering bevindt zich tussen 'D' en 'E'. Dit is het breedste punt van de onderarm. Deze metingen zijn voor maatwerk.

STAP 4



'E'-omvang

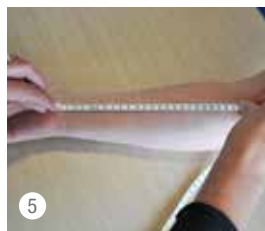

'E'-lengte

De (licht gebogen) omvang van de elleboog is de **'E'-markering** (zie foto's 4-5). Dit is de op een na belangrijkste meting. Om te bepalen of uw patiënt in confectie past.

STAP 5

De **'F'-markering** is de smalste biceps omvangsmeting. De F1 is de breedste biceps omvangsmeting. Deze meting is nodig voor maatwerk. Als er significante onregelmatigheden in de bovenarm zijn, dan geeft u meerdere 'F' maten door (F2, F3, enz.). Op die manier sluit de JoViPak armbandage optimaal aan.

STAP 6

'G'-omvang

De '**G**'-markering (zie foto 6) is vereist voor alle armbestellingen tot de oksel. Om er zeker van te zijn dat het meetlint rechtstreeks uit de oksel komt, kunt u een gevouwen stuk papier om de bovenarm wikkelen (pas op voor snijwondjes) en markeren waar de uiteinden van het papier samenkomen.

STAP 7

Lengte C-G

Meet de lengte van de arm van 'C' tot 'G' terwijl de **patiënt staat** (zie foto 7). De arm moet naast het lichaam hangen. Controleer de meting twee keer om de precieze lengte te krijgen. (Als de mouw te ver in de oksel komt, voelt dit ongemakkelijk en drukt het bovendien het hele verband naar beneden over de vingers van de patiënt.) Indien de patiënt een losse huidplooi aan de achterkant van de okselplooi heeft is het verstandig om de lengte iets korter op te geven.

OPMERKING

Indien u een AG1 bestelt en de markering **AG1 niet invult**, wordt er **automatisch 10 cm** aan de buitenkant toegevoegd (lateraal aspect) van het verband. Dit wordt de laterale verlenging genoemd en helpt oedeemophoping boven het verband te voorkomen.

STAP 8

Voeg een **handomtrek tekening** (zie foto 8) bij voor een maatwerk armverband. De hand van een confectieverband heeft een standaardlengte en gaat ongeveer tot de aanzet van het nagelbed of de DIP-gewrichten (het gewrichtje tussen het voorlaatste en het eindkootje). Als u een handomtrekformulier gebruikt voor maatwerkverbanden dient u een horizontale stippellijn te tekenen, op de plek waar het verband moet eindigen. **Vul op het formulier de 'totale handlengte' in.**

STAP 9

Druk de handpalm van de patiënt stevig op het omtrekformulier. Zorg ervoor dat de buiglijn boven de gestippelde 'C'-markering op het formulier ligt. Noteer de werkelijke lengte van de hand vanaf de buiglijn 'C'-markering (zie foto 9) tot het puntje van de middelvinger 'A'-markering zodat we kunnen zien of het binnengekomen formulier tijdens versturen niet is vervormd of aangetast.



Meet de palmomtrek ter hoogte van de duimaanzet; de 'B'-markering (zie foto 10). Meet de duim niet mee.

Een patiënt met flinke huidplooien

Wanneer een maatwerk arm wordt besteld voor een patiënt met **flinke huidplooien** aan de bovenarm, tilt u voor het meten het weefsel op met plasticfolie. (Misschien hebt u liever dat de patiënt hierbij ligt.) Het is de bedoeling dat het JoViPak verband het weefsel optilt naar waar het zich moet bevinden. Als u denkt dat uw patiënt in een confectie arm past, ga dan naar de bestelformulieren met de maatschema's op www.jobst.nl.

Confectie arm

Deze producten zijn net zo effectief als een maatwerk arm. Als u denkt dat uw patiënt in een confectie arm past, ga dan naar de maattabellen op pagina 15. Als het smalste punt van de pols van uw patiënt ('C'-markering) in een maat in de tabel past, ga dan naar de kolom voor het smalste punt van de elleboog of de 'E'-markering. Als die past, ga dan naar de oksel of de 'G'-markering. Als die ook past en de lengte van de pols tot de oksel tussen 40,5 - 45,5 cm ligt, kunt u een confectie arm bestellen. Deze zijn verkrijgbaar in Black of Royal Blue in Polartec Powerdry materiaal.

Maatwerk arm

Als u een maatwerk arm bestelt, moet u zowel het meetformulier als het handomtrek formulier invullen en faxen/mailen zodat we de juiste maat bestellen. Omdat JoViPak verbanden niet zo flexibel zijn als compressiekleding voor overdag hebben we uitgebreide maten en patiëntinformatie nodig voor maatwerkverbanden. Als u een maatwerk arm bestelt, heeft de patroontekenaar van JoViPak zoveel mogelijk afmetingen nodig. Stuur bij ongewone vormen daarom zoveel mogelijk foto's mee (voor-, zij- en achterkant).

HET OPMETEN VAN HET BEEN

STAPSGEWIJZE INSTRUCTIE VAN HET MEETPROCES

U gebruikt voor het meten van JoViPak beenverbanden vrijwel dezelfde meetpunten als voor het meten van compressiekousen voor overdag. Bedenk wel dat JoViPak verbanden minder flexibel zijn, dus hoe meer informatie u meestuint, hoe beter we een product voor de patiënt kunnen maken.

De meest gestelde vraag is: 'Meet ik de patiënt staand of liggend?' De vorm van het been is hierin de bepalende factor. Als het been een redelijk normale vorm heeft, kan de patiënt tegen een meetplank staan om het meten te vergemakkelijken. Als het been een onregelmatige of sterk conische vorm heeft, laat de patiënt dan plat op de rug liggen. Leg de meetplank onder de heup met de hak plat tegen het voeteneind van het bord. Zie de volgende pagina voor het meten van patiënten met flinke huidplooien of overhangend weefsel.

De beenmarkeringen (zie meetformulieren) moeten de omtrek en lengte aangeven. Voorbeeld: als de 'B'-markering (smalste enkelpunt) '25 cm op 9 cm' is, betekent dit dat de omtrek 25 cm is en dat de meting is opgenomen op 9 cm (lengte) vanaf de vloer of de onderkant van de hak. Gebruik dit systeem voor het hele been en vul de benodigde markeringen in op het juiste meetformulier. Zorg ervoor dat de omtrekmetingen zijn genomen met uw meetlint horizontaal en uw lengtemetingen in een rechte lijn en niet volgens de contouren van het been.

STAP 1



Voetmarkeringen worden uitgedrukt in kleine letters en beenmarkeringen in hoofdletters. Als u een meetplank gebruikt, kunt u de totale voetlengte (zie foto 1) bepalen door het meetlint recht tegen het uiteinde van de langste teen te houden. Laat anders uw patiënt op het meetlint staan. Het distale uiteinde van het verband wordt gesneden in een hoek om de tenen bloot te leggen, maar de zool ervan loopt tot het puntje van de langste teen.

STAP 2



Meet de 'B'-markering om de voet bij de aanzet van de kleine teen, en over het breedste punt van de bal van de voet.

STAP 3



De 'I'-markering (zie foto 3) geeft 'Instap' aan, het hoogste punt van de voetholte of het tarsometatarsale gewricht.

STAP 4



Meet de hiel/enkelmarkering met de voet in 90 graden waarbij de tenen naar de neus worden getrokken. Bij beperkte mobiliteit van de enkel kunt u 1 cm omtrek toevoegen.

OPMERKING

De 'B'-markering (smalste enkelomvang) zit meestal boven de malleolus. Als uw patiënt overhangend weefsel heeft, laat u de patiënt voor het meten liggen. Geef de smalste enkelomvang in, zelfs als deze onder het overhangende weefsel zit. De patroontekenaar heeft deze maat nodig omdat er bij het maken van een bandage voor deze conditie vaak pijltjes in dit gebied moeten komen. De 'B1'-markering zit onderaan de kuit (Gastrocnemius), daar waar de achillespees vastzit aan de kuitspier.

STAP 5



De 'C'-markering (zie foto's 5-6) is het dikste punt van de kuit. Deze voorbeelden worden getoond met een maatplank. De linker foto (5) toont de lengte en de rechter (6) de omtrek. (Herhaal deze methode met alle maten.)

STAP 6



De 'D'-markering (zie foto 7) zit net onder de knieschijf. De 'E'-markering bevindt zich op het midden van de patella.

De 'F'-markeringen verwijzen naar de dij: de 'F'-markering is de onderdij, de 'F1'-markering de middendij en de 'F2' de bovendij. Als de dij niet cilindrisch is of overhangende huidplooien heeft, kunt u ons aanvullende metingen tussen 'E' en 'G' (de lies) geven en foto's e-mailen naar jovi@bsnmedical.com. Zorg ervoor dat u ons de lengte geeft van elke 'F'-markering (zoals afgebeeld op de meetplank) of vanaf de onderkant van de hak.

STAP 7



De 'G'-markering (zie foto 8) zit bij de lies; zorg ervoor dat u met het lint horizontaal meet en meet zo hoog mogelijk.

STAP 8



De 'G1'-markering (zie foto 9) is optioneel. Als u een 'AG1'-verband bestelt en geen maat opgeeft, voegt JoViPak automatisch een laterale verlenging van 12,5 cm toe aan de buitenkant (lateraal). Deze laterale verlenging kan tot de rand van het bekken lopen. Als u een lengte van meer dan 12,5 cm boven de 'G'-markering bestelt dan heeft u om het verband op zijn plaats te houden een compressiebroek nodig. JOBST JoViJacket™ is niet lang genoeg en zal uit zichzelf terugrollen. NB! Laat het ons weten als het beenstuk afwisselend voor beide benen wordt gebruikt. De laterale verhoging op 'G' en de schuine open teen worden dan niet besteld, waardoor het beenverband voor beide benen kan worden gebruikt.

STAP 9



Een patiënt met overhangend weefsel opmeten: als uw patiënt flinke huidplooien heeft waarbij weefsel ander weefsel overlapt, dan dient u de patiënt in een achteroverleunende positie op te meten met de plooien opgetild door deze met Isoband of plasticfolie in te pakken. JoViPak ontwerpt zonodig extra grote beenstukken. Volg de contouren niet met uw meetlint; het verband wordt dan te lang. U kunt gebruikmaken van een meetplank zolang het niet te ongemakkelijk voor uw patiënt is of het overtollig weefsel de nummers van het bord niet afschermt. Als u voor de lengtemarkeringen een meetlint gebruikt, zorg er dan voor dat u in een rechte lijn meet vanaf de onderkant van de hiel tot de lies (zie foto 10).

Meten voor een standaard onderbeenstuk of maatwerk

Om te bepalen of uw patiënt in een confectie (alleen AD) of een maatwerk beenverband past, gaat u naar de maattabel op pagina 30. Als de smalste enkel of 'B'-markering van uw patiënt in een maat van de tabel past, gaat u in de tabel naar de kolom breedste kuitomvang, of 'C'-markering. Als dat ook past, gaat u naar de smalste kniemeting of 'D'-markering. Als dat past en de lengte van de grond of onderkant van de hiel tot de knie tussen 38 - 46 cm is, kunt u een confectie AD bestellen. Deze zijn verkrijgbaar in Black of Royal Blue Polartec Powerdry. Als het beenverband korter is dan 38 cm of langer dan 46 cm, of als uw patiënt een andere kleur wenst, dan kunt u maatwerk bestellen.

Voor maatwerkverbanden is aanvullende informatie nodig

Vul het meetformulier en het voetomtrek formulier **volledig** in. Omdat maatwerk producten niet kunnen worden geretourneerd, willen we alles doen om u te helpen bij het kiezen van het juiste verband voor uw patiënt. Omdat JoViPak verbanden niet zo flexibel zijn als compressiekousen voor overdag, hebben we uitgebreide afmetingen en patiëntinformatie nodig voor maatwerk bestellingen. Indien u een maatwerk verband bestelt dan heeft de patroontekenaar van JoViPak zoveel mogelijk afmetingen nodig als u kunt geven.

E-mail zo mogelijk foto's van het betreffende gebied naar jovi@bsnmedical.com

JOVIPAK SCHOUDER-THORAX

036 - 53 89 575 of jovi@bsnmedical.com


MAATWERK MAATSHEMA JOVIPAK SCHOUDER-THORAX LINKS/RECHTS

FORMULIER 2

naam: _____
 tussenvoegsel: _____
 achternaam: _____
 adres: _____
 postcode: _____
 plaats: _____

☐ Man
☐ Rechts
☐ Lumpectomy
☐ Secundair lymfoedeem
☐ Herhaling

hebben een gegarandeerde pasvorm, mits de maten en patiëntinformatie

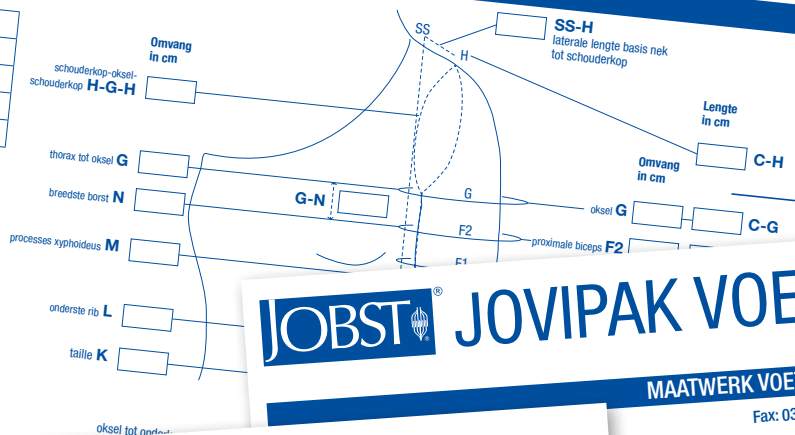

JOBST® JOVIPAK VOETOMTREK TEK

MAATWERK VOETOMTREK TEKENING JOVIPAK RECHTS

Fax: 036 - 53 89 575 of jovi@bsnmedical.com

JOVIPAK ARM

FORMULIER 1

MAATWERK BESTELFORMULIER JOVIPAK ARMVERBAND

Fax: 036 - 53 89 575 of jovi@bsnmedical.com

naam: _____
 tussenvoegsel: _____
 achternaam: _____
 adres: _____
 postcode: _____
 plaats: _____


(1 + A-CG1)

onderarm. Let op: Een rits over de gehele lengte wordt
en over de bewegende delen.

niet vergoed en separaat geleverd.

de formulieren naar: jovi@bsnmedical.com

☐ Handomtrek tekening (3a/3b)
☐ Receptformulier

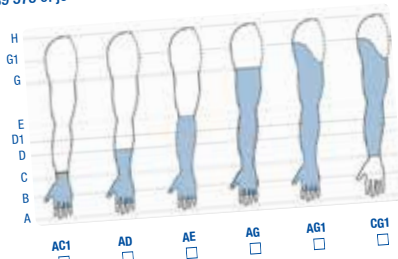

Armverband AG1
 Polartec®
 Powerdry Slimline



JoViJacket



KLEUR/AFWERKING (kies materiaal en kleuren)

Polartec® Powerdry

☐ Black

☐ Buff

☐ French Blue

☐ Glacier Blue

☐ Navy Blue

☐ Pink

☐ Plum

☐ Royal Blue

☐ Stainless Steel

☐ White (zacht roze tint)

Polartec® Silkweight

☐ Black

☐ Blue Ridge

Katoen/Lycra®

☐ Ivory

☐ Royal Blue

Andere mogelijkheden

☐ Slimline (meer kanalen minder schuim)

☐ Vingertoppen bedekken

☐ Tot basis vingers

☐ 2 Blend foam (minder hard schuim voor een zeer gevoelige huid)

1-7-2016_v1

036 - 53 89 575, Fax: 036 - 53 89 575, e-mailadres: jovi@bsnmedical.com, www.jobst.nl


OPTIES

☐ Rechts

Stuks _____

ARMVERBAND

FORMULIER 1

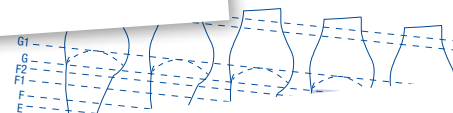

Beenverband AG1

6. BESTELLEN

BESTELLEN VAN JOBST JOVIPAK

Voor het bestellen van JOBST JoViPak producten kunt u naar www.jobst.nl. Op deze site vindt u onderstaande overzicht met linkjes naar de juiste formulieren. De formulieren zijn in PDF formaat en kunnen digitaal ingevuld worden. U kunt de formulieren naar BSN medical mailen via jovi@bsnmedical.com.

JOBST JoViPak confectie orderformulieren


JoViLiners (voorheen JoViPack Transitions)	Bestelformulier	Receptformulier
JoViPak Arm	Bestelformulier	Receptformulier
JoViPak Box Glove	Bestelformulier	Receptformulier
JoViPak Been	Bestelformulier	Receptformulier
JoViPak Hoofd, Nek en Kin	Bestelformulier	Receptformulier
JoViPak Pads Genitaal	Bestelformulier	Receptformulier
JoViPads Borst en Borstwand	Bestelformulier	Receptformulier
PitPaks* en JoViPads	Bestelformulier	Receptformulier

JOBST JoViPak maatwerk orderformulieren

Bovenlichaam				
JoViPak Arm	Bestelformulier	Receptformulier	Maatschema	Hand links / rechts
JoViPak Schouder - Thorax	Bestelformulier	Receptformulier	Maatschema	Hand links / rechts
JoViPak Vest	Bestelformulier	Receptformulier	Maatschema	
JoViPak Busti	Bestelformulier	Receptformulier	**	
Onderlichaam				
JoViPak Been	Bestelformulier	Receptformulier	Maatschema	Voet links / rechts
JoViPak Hip Hugger	Bestelformulier	Receptformulier	Maatschema	
JoViPak Boxer Short	Bestelformulier	Receptformulier	Maatschema	

* JOBST PitPaks worden niet vergoed

** Het maatschema is in het bestelformulier verwerkt

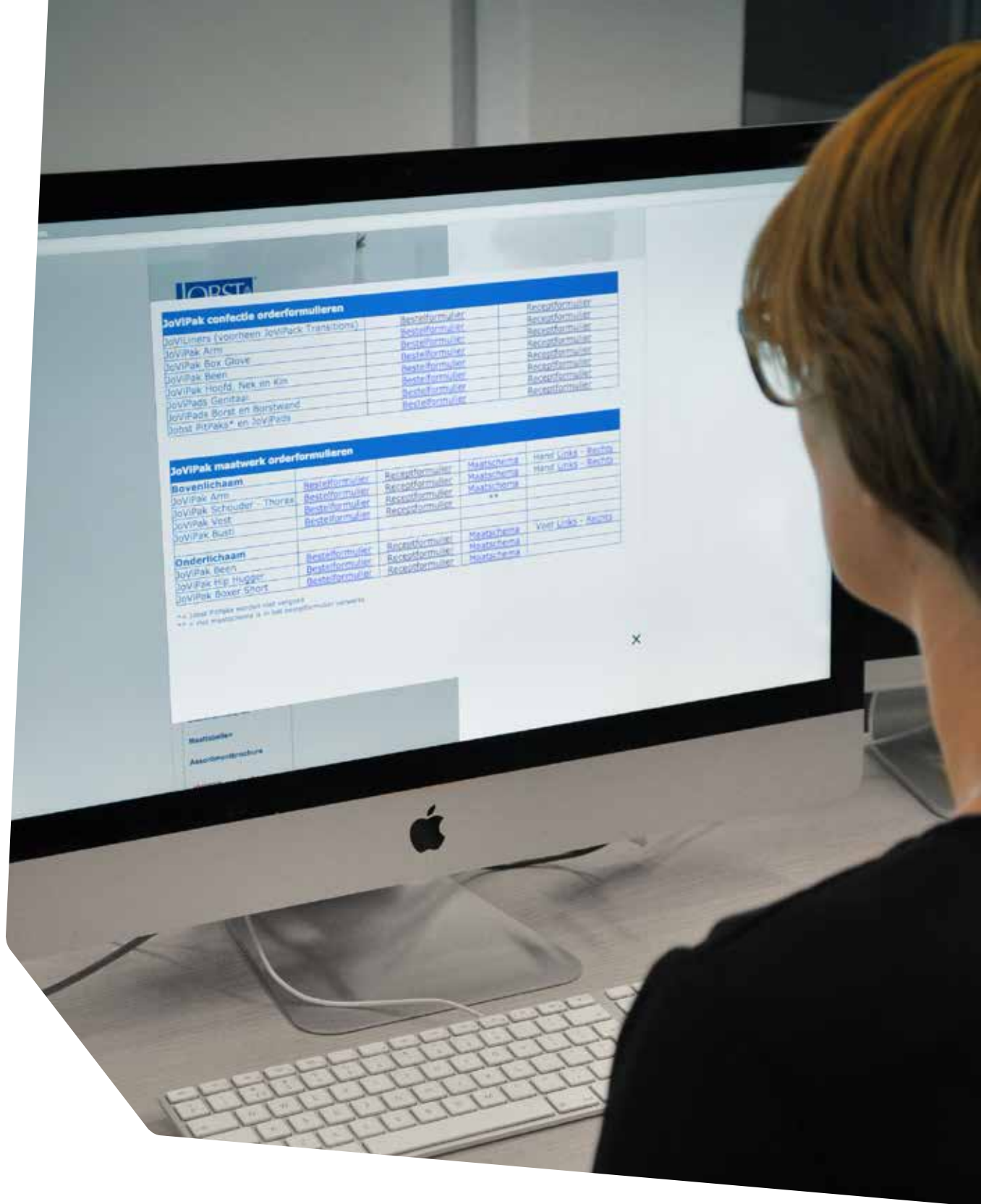

“ OP WWW.JOBST.NL VINDT U
 ALTIJD DE LAATSTE VERSIES VAN
 DE JOVIPAK FORMULIEREN ”

BSN medical BV

Postbus 1376
1300 BJ Almere

www.jobst.nl
www.bsnmedical.com
jovi@bsnmedical.com
Tel 036 - 53 89 597

